

Biotrue Płyn do soczewek 300ml

Cena: 36,00 zł



Opis słownikowy

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 300 ml |
| Postać | płyn |
| Producent | BAUSCH & LOMB POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Składniki:

Hialuronian, sulfobetaina, poloksamina, kwas borowy, boran sodu, sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, chlorek sodu; konserwowany 0,00013% roztworem biguanidu poliaminopropylu oraz 0,0001% polyquaternium.

Działanie:

Do codziennej pielęgnacji, oczyszczania, usuwania osadów białkowych, płukania, chemicznej (nie termicznej) dezynfekcji oraz przechowywania miękkich (hydrofilowanych) soczewek kontaktowych (w tym także soczewek silikonowo-hydrożelowych) zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Sposób użycia:

Na powierzchni soczewki po każdej stronie należy umieścić 3 krople płynu i delikatnie pocierać przez 20 sekund. Następnie należy przez 5 sekund dokładnie płukać obie strony soczewki płynem. Oczyszczone soczewki należy umieścić w pojemniku i napełnić pojemnik świeżą porcją płynu. Soczewki powinny być zanurzone w płynie przez co najmniej 4 godziny. Za każdym razem należy wylać z pojemnika zużyty płyn. Zawsze należy dokładnie zakręcać butelkę z płynem. Przechowywać w temperaturze pokojowej.