

Corega Extra Strong 70g

Cena: 25,99 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	70 g
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wskazania:

Krem do protez zębowych zapewniający odpowiednie uszczelnienie brzegów protezy oraz jej pewne mocowanie.

Właściwości:

Produkt uniemożliwia przedostawanie się resztek jedzenia pomiędzy protezę a szczękę zapobiegając tym samym powstawaniu stanów zapalnych. Tworzy specjalną powłokę zapobiegając powstawaniu uczucia bólu w miejscu ucisku protezy. Pozwala na spożywanie takich pokarmów, na jakie ma się ochotę. Zapewnia długotrwałe uczucie świeżości.

Sposób użycia:

Dla zapewnienia bezpiecznego utrzymania protezy zębowej krem należy stosować raz dziennie. Zaczynać od małej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może powodować jego wypływanie. W przypadku wypłynięcia, należy użyć mniej kremu przy kolejnym użyciu. Nie należy stosować częściej, niż raz dziennie. Tubka kremu powinna wystarczyć na minimum 3 tygodnie stosowania. Jeśli wystarcza na krócej, oznacza to nadmierne zużywanie kremu, co może być objawem nieprawidłowego dopasowania protezy. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania kremu i skonsultować dopasowanie protezy ze swoim lekarzem dentystą.