

Corega Max Osłona krem 40 g



Cena: 27,80 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Skład Corega Max Osłona krem:

Calcium/Sodium PVM/MA Co-polymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum.

Działanie Corega Max Osłona krem:

Preparat o silnych właściwościach mocujących protezę zębową. Krem Corega Max Osłona tworzy specjalną, bardzo zaawansowaną osłonę, który wyjątkowo skutecznie blokuje przedostawanie się kawałków jedzenia pod protezę. Produkt ma wygodną w użyciu, precyzyjną końcówkę, która umożliwi szybką aplikację odpowiedniej ilości preparatu na krawędziach protezy. Krem o neutralnym smaku.

Zastosowanie:

Corega Max Osłona krem przeznaczony do stosowania do mocowania protez zębowych. Produkt dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Stosowanie preparatu częściej niż raz dziennie należy skonsultować z lekarzem, jednakże nie zaleca się stosować częściej niż raz dziennie. Należy przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia dyskomfortu lub reakcji alergicznej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kremu.

Sposób użycia Corega Max Osłona krem:

Użyć odpowiedniej ilości preparatu (zbyt duża ilość spowoduje wypływanie kremu). Połknięcie niewielkiej ilości preparatu jest nieszkodliwe. Na czystą i suchą protezę nanieść krem, aplikując go niezbyt blisko krawędzi. Przed włożeniem protezy do ust należy wypłukać jamę ustną wodą. Założyć protezę, docisnąć, przygryzając ją przez kilka sekund. W celu usunięcia protezy należy przepłukać jamę ustną wodą. Delikatnie poruszając protezą, wyjąć ją powoli. Miękką szczoteczką i ciepłą wodą usunąć resztki preparatu z protezy i jamy ustnej.