

# Dexoftyal UD krople do oczu 10 minims.



Cena: 26,92 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 minims. po 0,35 ml
Postać	krople do oczu
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Składniki:

Dekspantenol 2%, hydroksypropylceluloza (HydraFlex) 0,5%. Nie zawiera konserwantów.

### Działanie:

Dexoftyal UD Krople do oczu to wyrób medyczny w postaci jednodawkowych minimsów. Preparat przynosi szybką i długotrwałą ulgę suchym i zmęczonym oczom. Zaletą jest to, że krople można aplikować bezpośrednio na soczewki i w trakcie ich noszenia! Są to jałowe, lepkie, przejrzyste krople do oczu o działaniu nawilżającym i odżywczym. W składzie zawarto dekspantenol (prowitamina B5). Wspomaga on procesy regeneracyjne rogówki. Drugim składnikiem jest HydraFlex o właściwościach mukoadhezyjnych, który wspiera film łzowy, aby lepiej chronił powierzchnię oka. Preparat wspomaga regenerację, długotrwale nawilża i działa ochronnie na powierzchnię oka. Szybko łagodzi dyskomfort. Jest dobrze tolerowany, można stosować bez specjalnych ograniczeń. Wyrób medyczny Dexoftyal UD Krople do oczu przeznaczony do stosowania w przypadku pieczenia, podrażnienia, zaczerwienienia, suchości i uczucia zmęczenia oczu, czyli objawów wywołanych przez podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek, długotrwałym patrzeniem na monitor, długotrwałą jazdą samochodem, klimatyzacją, zanieczyszczeniem powietrza, chlorowaną wodą, czynnikami atmosferycznymi.

### Informacje dodatkowe:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Jednodawkowe opakowania są przeznaczone do jednorazowego użytku. Nie zawiera konserwantów i składników pochodzenia zwierzęcego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie należy stosować razem z lekami do oczu. Nie stosować po terminie ważności.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu. Nie stosować w przypadku zakażenia oczu.

### Sposób użycia:

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed zastosowaniem zaleca się zapoznać z ulotką. Krople można stosować na dwa sposoby: aplikacja bezpośrednio do oka – osoby, które noszą soczewki nie muszą ich zdejmować; dolną powiekę lekko odciągnąć w dół,

zaaplikować 1-2 krople do oka, zamrunąć 2-3 razy, aby równomiernie rozprowadzić kroplę po powierzchni oka, następnie czynność powtórzyć z drugim okiem; aplikacja za pośrednictwem soczewek kontaktowych – soczewkę ułożyć na palcu, nanieść na nią 1-2 krople, następnie soczewkę włożyć do oka. Zamrunąć 2-3 razy. Końcówką pojemnika nie dotykać oka oraz innych powierzchni.