

# Dexoftyal Żel 10g



Cena: 33,49 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 g
Postać	żel
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Składniki:

Dekspantenol 5% (m/V), 20% roztwór wodorotlenku sodu, karbomer, sól dwusodowa kwasu wersenowego, cetrymid, woda do wstrzykiwań.

### Działanie:

Wyrób medyczny Dexoftyal żel to preparat o unikalnej formule z dekspantenolem 5% oraz karbomerem. Pozwala on utrzymać nawilżenie oka oraz uzyskać lepkość odpowiadającą lepkości łez. Zapewnia ochronę powierzchni oka oraz długotrwałe łagodzi objawy suchości oczu – suchość, podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie, zmęczenie, uczucie obecności ciała obcego. Polecany jest między innymi jako preparat nawilżający dla osób, które spędzają wiele godzin przed komputerem, przez co odczuwają dyskomfort oczu, a także jako wsparcie w leczeniu zapalenia spojówek.

### Zastosowanie:

Wyrób medyczny Dexoftyal żel przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia suchości oka oraz ochrony powierzchni oka w przypadku zaburzeń filmu łzowego. Odpowiedni do stosowania w przypadku odczuwania takich objawów jak podrażnienie, pieczenie i uczucie obecności ciała obcego, które wywołane są m.in. działaniem czynników środowiskowych (wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, światło, klimatyzacja, ogrzewanie), długotrwałą pracą przy komputerze, długotrwałym oglądaniem telewizora, okulistycznymi zabiegami chirurgicznymi, zapaleniem spojówek, stosowaniem soczewek kontaktowych.

### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie należy stosować, jeśli tuba lub plomba zabezpieczająca jest uszkodzona. Po pierwszym otwarciu można stosować przez 8 tygodni.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

### Sposób użycia:

Do stosowania do oczu. Tubę odkręcić, lekko odchylić głowę i odciągnąć dolną powiekę. Do utworzonej kieszonki wpuścić kroplę żelu, następnie 2-3 razy zamrużyć, aby rozprowadzić preparat po całej powierzchni oka. Następnie zetrzeć nadmiar żelu z okolic powiek. O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować jedną kroplę raz dziennie. Po użyciu zamknąć tubę. W sposób ciągły można stosować przez 30 dni. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć przed aplikacją żelu, a po zastosowaniu preparatu odczekać przynajmniej 15

minut zanim zostaną ponownie założone.