


DIATHER Test ciążowy płytkowy

Cena: 4,99 zł

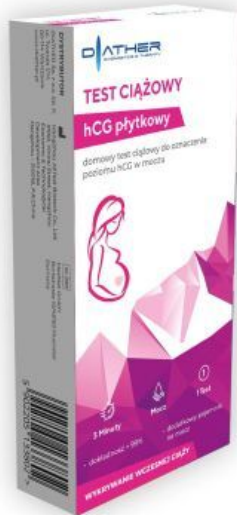

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Test płytkowy
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	
Zastosowanie	Test diagnostyczny

Opis produktu

Test ciążowy płytkowy jest przeznaczony do wykrycia obecności hormonu hCG w moczu kobiety w celu potwierdzenia lub wykluczenia zapłodnienia komórki jajowej (potwierdzenie lub wykluczenie ciąży). Test można wykonywać o każdej porze dnia, jednakże najwyższe stężenie hormonu odnotowuje się w moczu porannym oddanym po przebudzeniu. Badanie jest proste oraz szybkie w wykonaniu.

Oczekiwanie na wynik trwa jedynie 3 minuty.

Podczas owulacji (jajeczkowania) dochodzi do uwolnienia z jajnika dojrzałej, gotowej do zapłodnienia komórki jajowej, która dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z nasieniem mężczyzny. Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Test ciążowy wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu hCG, co pozwala potwierdzić lub wykluczyć ciążę.

Test jest wyjątkowo czuły i pozwala wykryć hormon hCG przy stężeniu 25 mIU/ml.

Wskazania

Test ciążowy płytkowy jest przeznaczony do wykrycia obecności hormonu hCG w moczu kobiety w celu potwierdzenia lub wykluczenia zapłodnienia komórki jajowej - potwierdzenie lub wykluczenie ciąży.

Wskazaniem do wykonania testu jest:

- spóźniająca się miesiączka
- współżycie bez zabezpieczenia.

Sposób użycia

Test można wykonywać o każdej porze dnia, jednakże najwyższe stężenie hormonu odnotowuje się w moczu porannym oddanym po przebudzeniu.

Badanie jest proste oraz szybkie w wykonaniu. Wykonanie badania polega na dodaniu na płytkę testową 3 kropli moczu i odczytaniu wyniku badania. Oczekiwanie na wynik trwa jedynie 3 minuty.

Ważne

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku.
- Przed wykonaniem testu należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użycia dołączoną do zestawu.

Zawartość opakowania

- 1 saszetka z testem kasetkowym
- 1 pipeta
- 1 pojemnik na mocz
- instrukcja obsługi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. JAK DZIAŁA TEST CIĄŻOWY ?

Za pomocą testu określany jest poziom hormonu hCG w moczu. Poziom hormonu wzrasta po zapłodnieniu dojrzałej komórki jajowej.

2. JAK CZUŁY JEST TEST CIĄŻOWY ?

Test wykrywa hormon gonadotropinę kosmówkową (hCG) o stężeniu 25 mIU/ml i powyżej.

3. JAK WIARYGODNY JEST TEST ?

Wiarygodność testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodności testu laboratoryjnego. Przeprowadzono również ocenę kliniczną, porównując wyniki uzyskane przy użyciu TESTU CIĄŻOWEGO z innym komercyjnym dostępnym na rynku testem hCG w moczu. Badanie kliniczne obejmowało 608 próbek moczu: oba testy wykazały 231 wyników pozytywnych i 377 wyników negatywnych. Na podstawie wyników stwierdzono ponad 99% dokładność TESTU CIĄŻOWEGO w porównaniu z innym testem hCG w moczu. Ponadto wykazano, że na wynik TESTU CIĄŻOWEGO nie wpływa obecność innych hormonów w moczu: hormonu LH (do 300 mIU/ml), FSH (do 1000 mIU/ml) czy TSH (do 1000 µIU/ml).

4. KIEDY NALEŻY WYKONAĆ TEST ?

Test należy wykonać w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki, można go wykonać o każdej porze dnia; największe stężenie hormonu gonadotropiny kosmówkowej (hCG) zawarte jest w moczu porannym.

5. DLACZEGO ZALECA SIĘ WYKONANIE TESTU Z PIERWSZEGO PORANNEGO MOCZU ?

Badanie można przeprowadzić o każdej porze, jednak pierwszy poranny mocz zawiera najwyższe stężenie gonadotropiny kosmówkowej (hCG).

6. SKĄD WIADOMO, ŻE TEST ZOSTAŁ WYKONANY PRAWIDŁOWO ?

Obecność barwnej linii w polu kontrolnym C testu świadczy o prawidłowo wykonanej procedurze i zastosowaniu odpowiedniej wielkości próbki.

7. CO NALEŻY ZROBIĆ JEŻELI WYNIK TESTU JEST NEGATYWNY ?

Negatywny wynik testu oznacza, że hormon hCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie ma ciąży. Jeżeli miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni, należy powtórzyć test. Możliwe, że źle wyliczono dzień rozpoczęcia miesiączki.

8. CO NALEŻY ZROBIĆ JEŚLI WYNIK TESTU JEST POZYTYWNY ?

Pozytywny wynik testu oznacza, że hormon hCG został wykryty w moczu i prawdopodobna jest ciąża. Ciążą może być potwierdzona jedynie przez lekarza, który udzieli dalszych wskazówek.

Galeria

Schemat użycia



Zawartość zestawu



Interpretacja wyników

