

DIATHER Test Covid-19 Antygen ze śliny

Cena: 12,96 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 zestaw
Postać	Test diagnostyczny
Producent	Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
Rejestracja	Wyrób medyczny
Zastosowanie	Test diagnostyczny

Opis produktu

COVID-19 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową, mogąc wywoływać w trakcie infekcji osłabienie, gorączkę, suchy kaszel i duszność. Wirus SARS-CoV-2 jest bardziej zakaźny niż SARS. Okres inkubacji wirusa wynosi od około 3 dni do 16 dni, co staje się dużym zagrożeniem, gdyż zakaźność pojawia się już w okresie inkubacji. TEST COVID-19 ANTYPGEN ze śliny umożliwia szybką i dokładną diagnostykę, która jest ważną kwestią w izolowaniu pacjentów z objawami wskazującymi na COVID-19. Wynik testu odczytuje się w ciągu 15 minut.

Właściwości

- Jest to szybki i precyzyjny test.
- Wynik otrzymuje się w ciągu 15 minut
- Test jest łatwy w wykonaniu
- Test jest skuteczny.

Wskazania

Test Covid- 19 ANTYPGEN jest przeznaczony do wykrywania zakażenia SARS-CoV-2 w próbce śliny, co stanowi istotne narzędzie w procesie diagnozowania COVID-19. Należy go wykonać jeśli występują następujące objawy:

- gorączka
- zmęczenie
- suchy kaszel
- utrata węchu i smaku
- bóle mięśni
- kontakt z osobą zakażoną.

Sposób użycia

Przygotowanie:

Należy przygotować poszczególne elementy zestawu testowego.

Krok 1:

Należy pobrać próbkę : delikatnie wypłuj ślinę do lejka – powinna sięgać (bez pęcherzyków) do wysokości linii zaznaczonej na probówce.

Krok 2:

Aby uzyskać próbkę do badania: otwórz fiolkę z buforem, a następnie wlej cały bufor do probówki ze śliną. Umieść końcówkę zakraplającą na probówce, następnie delikatnie naciśnij ją w celu wymieszania próbki.

Krok 3:

Zakroplenie kasety: wyjmij kasetę testową z foliowej saszetki, następnie dodaj 2 krople próbki do okienka kasety testowej.

Krok 4:

Odczytanie wyniku: odczekaj i odczytaj wyniki w ciągu 15 minut.

Interpretacja wyników

Zawartość opakowania

- kasetka testowa
- zestaw do pobrania próbki (lejek, probówka i końcówka zakraplająca)
- bufor
- torebka na odpady
- instrukcja użycia

To jest wyrób medyczny do samokontroli. Należy używać go zgodnie z instrukcją użytkownika lub etykietą.

Producent:


Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER Petruszewicz Sp. K.
Ku Ujściu 19
80-701 Gdańsk

Galeria

Schemat użycia

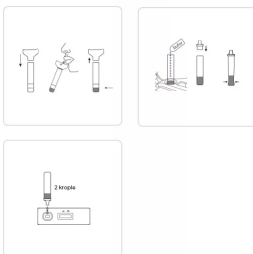

Interpretacja wyników

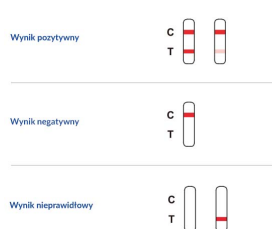

Zawartość zestawu

