

DIATHER Test Nietolerancja Glutenu+Celiakia

Cena: 45,00 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni
Opakowanie	1 test
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rejestracja	
Zastosowanie	Test diagnostyczny

Opis produktu

Test nietolerancja glutenu + celiakia to domowy, kasetkowy test immunochromatograficzny przeznaczony do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynom (DGP).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Test nietolerancja glutenu + celiakia jest przeznaczony do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko i gliadynom (DGP). W trakcie badania obecne we krwi przeciwciała klasy IgA (przeciwko tTG lub przeciwko gliadynie) połączą się z barwnymi cząsteczkami lateksu, opłaszczonymi przeciwciałami przeciwko przeciwiłom klasy IgA. Powstające koniugaty zbudowane z cząsteczek lateksu połączonych z przeciwciałami skierowanymi przeciwko IgA i z przeciwciałami klasy IgA, migrują wzdłuż membrany, zgodnie z siłami kapilarnymi do odpowiednich pól testowych (odpowiednio w polach T1 T2) znajdują się rekombinowane tTG i deaminowane peptydy gliadyny. Cząsteczki te wychwytyją koniugaty lateksowe utworzone w oparciu o obecne w próbce przeciwciała klasy IgA, skierowane przeciwko tTG i/lub przeciwko gliadynie w wyniku czego pojawiają się odpowiednie czerwone linie. Wyniki testu są interpretowane na podstawie obecności odpowiednich linii po 15 minutach.

ZASTOSOWANIE

Szybki test, przeznaczony do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko i gliadynom (DGP).

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

- wzdęcia i ból brzucha
- przewlekła biegunka
- wymioty

- zaparcia
- dla osób, które w najbliższej rodzinie mają krewnych z nietolerancją glutenu lub celiakią
- osoby z cukrzycą typu 1

OPAKOWANIE ZAWIERA

1x kasetka testowa,
1x pipeta plastikowa,
1x fiolka z buforem,
1x sterylny nakłuwacz do pobierania próbki krwi,

instrukcja użycia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST?

TEST NIETOLERANCJA GLUTENU+CELIAKIA jest przeznaczony dla osób z objawami takimi jak wzdęcia i ból brzucha, przewlekła biegunka, wymioty, zaparcia; dla osób, które w najbliższej rodzinie mają krewnych z nietolerancją glutenu lub celiakią, dla osób z cukrzycą typu 1. Test jest przydatny dla osób chorych na celiakię w celu monitorowania prawidłowości diety (w takim przypadku wyniki powinny być negatywne).

CO OZNACZA WYNIK NEGATYWNY?

Wynik negatywny testu oznacza brak nietolerancji glutenu. Nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań.

CO OZNACZA WYNIK POZYTYWNY?

Wynik pozytywny testu oznacza podejrzenie nietolerancji glutenu. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zlecić wykonanie dodatkowych badań.

JAKA JEST DOKŁADNOŚĆ TESTU?

Dokładność testu (tTG: transglutaminaza tkankowa) wynosi 98%.

Dokładność testu (DGP: deaminowane peptydy gliadyny) wynosi 98%.

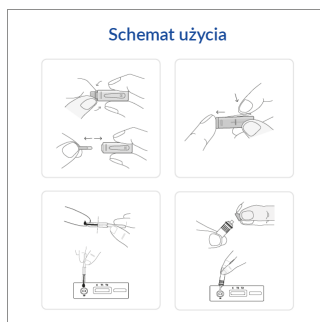
Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER

Petrusewicz Sp. K.

Ku Ujściu 19

80-701 Gdańsk

Galeria**Zawartość zestawu****Schemat użycia****Interpretacja wyników**