

DISNEMAR dla dzieci aerozol 25ml (niebieski)



Cena: 40,54 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|--------------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 25 ml (250 daw.) |
| Postać | aerozol do nosa |
| Producent | MYLAN EPD |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Składniki:

Woda oczyszczona o neutralnym pH, elektrolity – jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany, środek konserwujący – chlorek benzalkonium (zapobiega zakażeniu roztworu przez bakterie).

Działanie:

Izotoniczny roztwór soli mineralnych cechujący się neutralnym pH – Disnemar Baby. Wyrób medyczny w postaci roztworu donosowego oczyszcza nos, pomaga przywrócić odpowiedni poziom nawilżenia śluzówki nosa oraz wspiera jej regenerację. Działa także łagodząco na objawy niedrożności nosa. Preparat nie podrażnia śluzówki nosa, dzięki praktycznemu dozownikowi preparat można aplikować w pozycji leżącej.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Disnemar Baby przeznaczony do stosowania u dzieci od pierwszego dnia życia w codziennej higienie nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Preparat można stosować w celu nawilżenia wysuszonej śluzówki nosa (wysuszenie wywołane np. nawracającymi infekcjami, ekspozycją na kurz, klimatyzowane powietrze, dym papierosowy), w celu udrożnienia nosa w przypadku niedrożności nosa wywołanej stanami kataralnymi i alergicznymi (m.in. przeziębienie, nieżyt nosa, ostre i przewlekłe zapalenie zatok) oraz zanieczyszczonym powietrzem. Produkt można stosować w okresie ciąży i laktacji.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Jedno opakowanie zawiera 250 dawek.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia sprayu Disnemar Baby:

Dzieci, niemowlęta: aplikować kilka razy dziennie, stosując jednorazowo jedną dawkę do każdego otworu nosowego. W przypadku niemowląt zaleca się stosować preparat przed posiłkiem lub karmieniem (udrożnienie nosa pozwala na połykanie pokarmu bez

powietrza, zmniejsza to dolegliwości ze strony układu pokarmowego, które są związane z połykaniem powietrza). Nie ma ograniczeń dotyczących stosowania sprayu.