

Ectimer spray do nosa 100ml



Cena: 32,69 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	100 ml
Postać	spray do nosa
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Składniki:

Ektoina (Ectoin), woda morska, woda oczyszczona.

Działanie:

Preparat do stosowania w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu objawów zapalenia zatok i nieżyty nosa. Zawarta w sprayu ektoina działa łagodząco na stany zapalne, a także stabilizuje błony komórkowe. Hipertoniczny roztwór Ectimer Spray do nosa z wodą morską i ektoiną pomagają oczyszczać jamę nosową i zmniejsza obrzęk śluzówki nosa, umożliwiając swobodne oddychanie, działa nawilżająco, chroni przed wysychaniem. Wyrób łagodzi takie objawy jak podrażnienie, przesuszenie i przekrwienie śluzówki nosa oraz uczucie świądu. Dodatkowo preparat zmniejsza ryzyko powstawania w jamie nosowej strupów oraz ogranicza niekorzystne działanie zanieczyszczeń i alergenów na śluzówkę, a także wspomaga jej regenerację.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Ectimer Spray do nosa z wodą morską i ektoiną przeznaczony do stosowania w profilaktyce oraz wspomagająco w leczeniu objawów nieżytów nosa i zapalenia zatok. Preparat odpowiedni dla dzieci oraz niemowląt od 1. miesiąca życia. Nadaje się również dla wrażliwych nosów.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie zawiera konserwantów. Pojemnik pod ciśnieniem, nie wolno go palić i dziurawić, należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła, wysokiej temperatury oraz źródeł ciepła. Jedno opakowanie powinno być stosowane przez jedną osobę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu medycznego.

Sposób użycia:

Zaleca się aplikować do każdego otworu nosowego od 2 do 6 razy dziennie, chyba że lekarz zaleci inaczej. Do codziennego stosowania. Nie stosować dłużej niż 6. tygodni. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.