


Help4skin gojenie oparzeń żel 75g

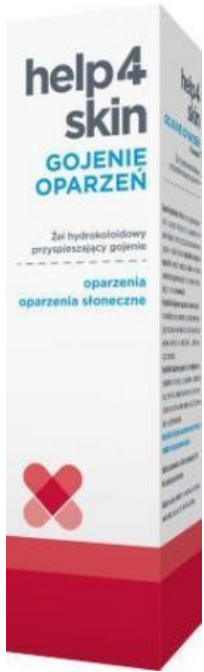

Cena: 51,07 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	75 g
Postać	żel
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Składniki:

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Działanie:

Preparat zapewnia kompleksowe działanie natychmiastowo chłodzi, łagodząc ból. W dłuższej perspektywie wspomaga gojenie rany, zmniejsza ryzyko infekcji, tworzą barierę ochronną. Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie Help4Skin Gojenie Oparzeń to inteligentny hydrożel, który normuje poziom wilgotności rany. Oznacza to, że chroni ją przed wysychaniem, a w sytuacji, gdy rana robi się zbyt wilgotna, absorbuje nadmiar wilgoci. Substancją aktywną preparatu jest karbomer stabilizowany karnozyną.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Help4Skin Gojenie Oparzeń żel przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia w przypadku oparzeń, oparzeń słonecznych oraz otarć i pęknięć skóry.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie zawiera parabenów. Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi podrażnienie skóry należy niezwłocznie przerwać aplikację.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować na duże otarcia o powierzchni większej niż 20cm³. Nie stosować na błony śluzowe, twarz, oczy i powieki.

Sposób użycia:

Do użytku zewnętrznego. Każdorazowo przed użyciem preparatu oraz po jego użyciu należy dokładnie umyć ręce. Oparzenia powierzchniowe: zaraz po oparzeniu należy schładzać to miejsce przez około 20 minut pod letnią, bieżącą wodą. Żel należy aplikować 1-2 razy dziennie. Preparat nakładać miejscowo, grubą warstwą. Unikać kontaktu końcówki dozownika z raną. Nie wcierać, jeśli zachodzi taka potrzeba, można założyć opatrunek. Oparzenia słoneczne: po oczyszczeniu oparzonego miejsca nałożyć preparat. Stosować cienką warstwę żelu 1-2 razy dziennie. Unikać kontaktu końcówki dozownika ze skórą. Nie wcierać. Można założyć opatrunek, jeśli zachodzi

taka konieczność. Drobne rany: po oczyszczeniu i zdezynfekowaniu rany, a także jej osuszeniu sterylną gazą nałożyć cienką warstwę żelu. Ponawiać aplikację 1-2 razy dziennie, nie dotykać końcówką dozownika rany. Nie wcierać. Można założyć opatrunek, jeśli zachodzi taka potrzeba.