

Lansinoh Asystent laktacyjny Korektor brodawki sutkowej



Cena: 39,49 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|----------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Producent | Lansinoh |
| Rejestracja | |

Opis produktu

W pierwszych dniach po narodzinach dziecka matki mogą doświadczyć nawału pokarmu lub obrzmienia piersi – przejściowych przypadłości, które mogą sprawić, że karmienie piersią może wywołać dyskomfort. Można zaobserwować, że brodawki, które zwykle były wystające staną się płaskie co może utrudniać przystawienie dziecka do piersi. Dla kobiet, które doświadczają tego problemu Lansinoh stworzyło LatchAssist™ proste urządzenie do łagodnego wyciągania brodawek piersi – pierwszy krok do udanego karmienia naturalnego.

Właściwości:

Delikatnie korygują kształt brodawek sutkowych – do łagodnego wyciągania płaskich brodawek
Łatwy w użyciu, efektywny, nieinwazyjny
Łatwy w użyciu – może być stosowany jedną ręką gdy dziecko znajduje się przy piersi
W komplecie specjalne etui do higienicznego i wygodnego przechowywania
Bez dodatku BPA i BPS

Wskazania:

Dla matek karmiących doświadczających podrażnienia i obrzęku piersi spowodowanego występowaniem płaskich brodawek

Sposób użycia:

Przed użyciem, umyj LatchAssist™ w gorącej wodzie z mydłem.
Dokładnie wypłucz i osusz.
Delikatnie przyciśnij bańkę i umieść osłonę nad i wokół brodawki.
Delikatnie naciśnij osłonę w dół opierając o skórę, sprawdzając czy dokładnie przylega do brodawki.
Delikatnie puść bańkę w celu uzyskania pożądanego ciśnienia. Czynność powtórz kilkakrotnie dopóki Twoja brodawka nie zacznie być wypukła, a Twoje dziecko będzie mogło z łatwością chwycić całą brodawkę.
Opróżnij resztki pokarmu, który mógł zebrać się w bańce.
Po użyciu, umyj ponownie, wypłucz i osusz

Uwagi

Produkt jest przeznaczony do użytku osobistego, przez 1 osobę.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi korzystania z urządzenia.
Nie można czyścić ani sterylizować przewodów lub złącza do przewodów.

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się na ulotce/instrukcji dołączonej do wyrobu

Zawartość opakowania:

1 x korektor LatchAssist™

2 x cones (19mm and 24mm)

Poręczne pudełeczko do przechowywania korektora