

Lansinoh woreczki do przechowywania pokarmu 25 sztuk



Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	25 sztuk
Producent	Lansinoh
Rejestracja	
Zastosowanie	Przechowywanie pokarmu

Opis produktu

Do szybkiego i wygodnego zamrożenie a następnie rozmrożenie pokarmu. Wykonane z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością bez dodatku substancji klejących co gwarantuje bezpieczne i zdrowe przechowywanie zawartości.

- Szczelne
- Sterylne, przeznaczone specjalnie do kontaktu z żywnością
- Wyposażone w podwójne zamknięcie strunowe, zapobiegające wyciekaniu pokarmu
- Miejsce na notatkę (np. datę odciągnięcia pokarmu) z dala od obszaru napełniania aby zapobiec uszkodzeniu woreczka i zanieczyszczeniu pokarmu
- Umieszczone w specjalnym podajniku co ułatwia dostęp i przechowywanie

Właściwości

- Bez dodatku BPA i BPS
- Szczelne
- Sterylne
- Podwójne zamknięcie zabezpieczające przed wyciekaniem zawartości
- Specjalne miejsce na zrobienie notatki poza obszarem napełniania woreczka by zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu area to eliminate potential puncture
- Wykonane z przeznaczonego do kontaktu z żywnością polietyleniu (PE)
- Wyposażone w specjalny podajnik dla łatwego dostępu i przechowywania
- Łatwe do napełniania
- Instrukcja użytkowania w komplecie

Wskazania

Do przechowywania i zamrażania odciągniętego mleka kobiecego.

Sposób użycia

- Rozerwij taśmę zabezpieczającą w górnej części woreczka a następnie otwórz delikatnie przesuwając suwak do siebie. Woreczki na pokarm Lansinoh są

sterylne, więc nie muszą być myte przed użyciem.

- Wyjmij jeden woreczek z podajnika, oderwij pasek zabezpieczający u góry woreczka i otwórz go delikatnie oraz napełnij woreczek Lansinoh pokarmem.
- Przed zamknięciem należy usunąć nadmiar powietrza z woreczka Lansinoh tak dokładnie, jak to możliwe. Chwyć woreczek pomiędzy palec wskazujący a

środkowy (jak nożyczki) i wyciśnij powietrze znajdujące się w górnej części woreczka w kierunku suwaka.

- Zamknij woreczek poprzez ściśnięcie pasków u góry. Wykonaj tę czynność dwa razy, aby upewnić się, że woreczek został szczelnie zamknięty.
- Przed zamknięciem woreczka odczytaj ilość mleka na wydrukowanej na torebce skali, zamknij torebkę i wpisz zawartość na etykiecie.
- Woreczki nadają się do jednorazowego użytku.
- Rozmrażaj stopniowo w lodówce, lub szybciej w temperaturze pokojowej. Możesz również rozmrażać pokarm umieszczając woreczek pod strumień ciepłej wody. Nie wkładaj woreczka do wrzącej wody ani nie umieszczaj w mikrofalówce.

Skład

Wykonane z Polietylenu (LDPE)
Bez dodatku BPA i BPS

Ważne

Skonsultuj się z położną lub doradcą laktacyjnym warunki przechowywania pokarmu. Jeżeli mrozisz swój pokarm nie napełniaj woreczka powyżej 3/4 obszaru napełniania, aby uniknąć pęknięcia i wycieku zawartości. Opisz woreczek datą odciągnięcia pokarmu. Nie wkładaj woreczka do wrzącej wody ani nie umieszczaj w mikrofalówce.

Nie zamrażaj ponownie wcześniej rozmrożonego pokarmu.

Nie przechowuj pokarmu na drzwiach lodówki. Półki na drzwiach lodówki są najcieplejszym obszarem.

Pozostawiaj datę odciągnięcia mleka na woreczkach i w pierwszej kolejności wykorzystuj najdawniej odciągnięty pokarm.

Zawartość opakowania

25 woreczków do przechowywania pokarmu