

Medela Butelka 150 ml ze smoczkiem S o wolnym przepływie

Cena: 27,08 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 butelka 150 ml + smoczek
Producent	Medela
Rejestracja	
Zastosowanie	Akcesoria dla dziecka

Opis produktu

Prawidłowo przygotowane odciągnięte mleko zawiera wszystkie potrzebne dziecku naturalne witaminy i składniki odżywcze. Łatwe w użyciu butelki Medela, dostępne w rozmiarach 150 ml i 250 ml pozwalają precyzyjnie odmierzyć porcje mleka dzięki skali w mililitrach i uncjach. Te poręczne, niezawierające BPA butelki pasują do wszystkich laktatorów Medela, możesz więc odciągać, przechowywać i podawać mleko, korzystając z tej samej uniwersalnej butelki.

Zalety

- Nietłukące się butelki Medela dostępne są w dwóch różnych rozmiarach: 150 ml ze smoczkiem z wolnym przepływem i 250 ml ze smoczkiem ze średnim przepływem. Smoczki na wymianę są dostępne osobno.
- Wykonane z materiałów niezawierających BPA butelki na pokarm można myć w zmywarce i podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
- Butelki te można stosować ze wszystkimi laktatorami i smoczkami Medela.
- Uniwersalne – idealne do odciągania, przechowywania, zamrażania i podawania mleka matki
- Jedna butelka do przechowywania i karmienia – nie marnujesz ani kropli cennego pokarmu
- Łatwe do mycia
- Trwałe – nie pękają ani nie rozpryskują się po upuszczeniu
- Materiał bezpieczny dla mamy i dziecka .

Wskazania

Butelka ze smoczkiem do przechowywania i podawania ściągniętego mleka.

Mycie

Myć wszystkie części w wodzie z detergentem bezpośrednio po użyciu w celu uniknięcia zasychnięcia pozostałości mleka oraz zapobiegania rozwojowi bakterii.

Do mycia używać wyłącznie wody pitnej.

Nie czyścić elementów systemu ostrym ani twardym przedmiotem takim jak szczotka, wykałaczka czy ostre paznokcie.

Mycie w zmywarce do naczyń może spowodować odbarwienie się niektórych części. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.

Nie dotykać wnętrza umytych części, aby uniknąć zanieczyszczenia .

Przed pierwszym użyciem i codziennie

- Zdemontować, umyć i wypłukać wszystkie części.
- Włożyć części do rondelka o dostatecznej pojemności.
- Nalać zimnej wody, aby wszystkie części były zanurzone.

Opcjonalnie można dodać łyżeczkę kwasu cytrynowego w celu uniknięcia tworzenia osadu.

- Podgrzać aż do zagotowania i gotować przez 5 minuty.
- Wyjąć z podgrzewacza i usunąć wodę.
- Osuszyć części czystym ręcznikiem.

Jako alternatywa do gotowania:

Zmywarka: Czyścić części na górnej półce.

Kuchenka mikrofalowa: Używać woreczków do kuchenki mikrofalowej Medela Quick Clean™ lub innych rozwiązań umożliwiających dezynfekcję w mikrofalówce.

Dezynfektor parowy: Przestrzegać instrukcji producenta

Po każdym użyciu

- Zdemontować wszystkie części i umyć w ciepłej wodzie z płynem.
- Przepłukać w czystej wodzie. Osuszyć części czystym ręcznikiem.
- Po oczyszczeniu, gdy części nie są w użyciu, przechowywać w czystej torebce na zamek błyskawiczny lub w pojemniku z pokrywką.
- Ewentualnie części można owinąć czystym papierem lub tkaniną ręcznikową.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
- Unikać dotykania wnętrza butelki i pokrywki.

Ważne

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Medela. Sprawdzić przed każdym użyciem: rozciągnąć przezroczysty element silikonowy we wszystkich kierunkach, aby sprawdzić, czy nie został uszkodzony. Wadliwy element należy wyrzucić po wystąpieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia .

Jest to produkt przeznaczony dla jednej osoby. Używanie przez więcej niż jedną osobę może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Ostrzeżenia

- Nie podgrzewać mleka w kuchenke mikrofalowej, gdyż może to spowodować nierównomierne ogrzanie i być przyczyną oparzenia dziecka.
- Nigdy nie używać smoczków do karmienia jako środka uspokajającego. Nieprzerwane i długotrwałe ssanie powoduje próchnicę zębów.

- Aby zachować składniki pokarmu, należy go rozmrażać, zostawiając na noc w lodówce. Można też trzymać butelkę bądź torebkę „Pump & Save” pod strumieniem bieżącej, ciepłej wody o temp. maksymalnie 37°C.
- Należy delikatnie obracać butelkę lub torebkę „Pump & Save”, aby wymieszać tłuszcz, który się oddzielił. Należy unikać potrząśnięcia pokarmem oraz wzbudzania go.

Przechowywanie i rozmrażanie pokarmu

- Nie przechowywać pokarmu na półkach drzwi lodówki. Należy w zamian wybrać najchłodniejsze miejsce w lodówce (jest to tylna część szklanej półki nad komorą warzyw).
- Odciągnięty pokarm można zamrozić w butelkach na mleko lub torebkach „Pump & Save”*. Nigdy nie należy napełniać butelek ani torebek powyżej 3/4 objętości, aby pozostawić miejsce na jej możliwe zwiększenie.
- Butelki lub torebki „Pump & Save” należy oznaczyć datą odciągnięcia.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżo odciągniętego pokarmu dla zdrowych niemowląt urodzonych o czasie

Zawartość opakowania

Butelka 150 ml

Smoczek S wolny przepływ

Tworzywo Butelka: Polipropylen

Smoczek: Silikon

Galeria

