

Medela Butelka na pokarm 150 ml 3 sztuki

Cena: 31,99 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	3 butelki 150 ml
Producent	Medela
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Zastosowanie	Przechowywanie pokarmu

Opis produktu

Butelki na pokarm Medela zostały opracowane z myślą o bezpiecznym, długim przechowywaniu mleka matki. Teraz można odciągać pokarm bezpośrednio do butelki, w której będzie się go przechowywać i za pomocą której będzie się karmić dziecko. Butelki są wykonane z bezpiecznego tworzywa umożliwiającego zachowanie korzystnych właściwości mleka matki, a także jego bezpieczne przechowywanie w lodówce czy zamrażarce. Kolorowa skala w uncjach i mililitrach ułatwia określenie dokładnej ilości odciągniętego mleka. Butelki wyposażone są w nakrętki zapobiegające wyciekowi mleka podczas przechowywania w lodówce czy zamrażarce bądź podczas transportu w trakcie podróży. Nietłukące się butelki Medela dostępne są w dwóch różnych rozmiarach: 150 ml w opakowaniach jedna lub trzy sztuki, 250 ml w opakowaniach jedna lub dwie sztuki. Butelki te można stosować ze wszystkimi laktatorami i smoczkami Medela

Wykonane z materiałów niezawierających BPA butelki na pokarm można myć w zmywarce i podgrzewać w kuchence mikrofalowej.

Zalety

- Brak konieczności przelewania – jedna butelka do odciągania, przechowywania, zamrażania i podawania pokarmu
- Łatwe do mycia
- Możliwość mycia w zmywarce i dezynfekcji w kuchence mikrofalowej
- Trwałe – nie pękają ani nie rozpryskują się po upuszczeniu
- Materiały bezpieczne dla mamy i dziecka .

Wskazania

Odciąganie pokarmu bezpośrednio do butelki, w której można go przechowywać i za pomocą której karmi się dziecko.

Mycie

Myć wszystkie części w wodzie z detergentem bezpośrednio po użyciu w celu uniknięcia zasychania pozostałości mleka oraz zapobiegania rozwojowi bakterii.

Do mycia używać wyłącznie wody pitnej.

Nie czyścić elementów systemu ostrym ani twardym przedmiotem takim jak szczotka, wykałaczka czy ostre paznokcie.

Mycie w zmywarce do naczyń może spowodować odbarwienie się niektórych części. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.

Nie dotykać wnętrza umytych części, aby uniknąć zanieczyszczenia .

Przed pierwszym użyciem i codziennie

- Zdemontować, umyć i wypłukać wszystkie części.
- Włożyć części do rondelka o dostatecznej pojemności.
- Nalać zimnej wody, aby wszystkie części były zanurzone.

Opcjonalnie można dodać łyżeczkę kwasu cytrynowego w celu uniknięcia tworzenia osadu.

- Podgrzać aż do zagotowania i gotować przez 5 minuty.
- Wyjąć z podgrzewacza i usunąć wodę.
- Osuszyć części czystym ręcznikiem.

Jako alternatywa do gotowania:

Zmywarka: Czyścić części na górnej półce.

Kuchenka mikrofalowa: Używać woreczków do kuchenki mikrofalowej Medela Quick Clean™ lub innych rozwiązań umożliwiających dezynfekcję w mikrofalówce.

Dezynfektor parowy: Przestrzegać instrukcji producenta

Po każdym użyciu

- Zdemontować wszystkie części i umyć w ciepłej wodzie z płynem.
- Przepłukać w czystej wodzie. Osuszyć części czystym ręcznikiem.
- Po oczyszczeniu, gdy części nie są w użyciu, przechowywać w czystej torebce na zamek błyskawiczny lub w pojemniku z pokrywką.
- Ewentualnie części można owinąć czystym papierem lub tkaniną ręcznikową.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
- Unikać dotykania wnętrza butelki i pokrywki.

Ważne

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Medela. Sprawdzić przed każdym użyciem: rozciągnąć przezroczysty element silikonowy we wszystkich kierunkach, aby sprawdzić, czy nie został uszkodzony. Wadliwy element należy wyrzucić po wystąpieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia .

Jest to produkt przeznaczony dla jednej osoby. Używanie przez więcej niż jedną osobę może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Nie zawiera bisfenolu A, DEHP (Phthalate) oraz lateksu.

Ostrzeżenia

- Nie podgrzewać mleka w kuchenke mikrofalowej, gdyż może to spowodować nierównomierne ogrzanie i być przyczyną oparzenia dziecka.
- Nigdy nie używać smoczków do karmienia jako środka uspokajającego. Nieprzerwane i długotrwałe ssanie powoduje próchnicę zębów.

- Aby zachować składniki pokarmu, należy go rozmrażać, zostawiając na noc w lodówce. Można też trzymać butelkę bądź torebkę „Pump & Save” pod strumieniem bieżącej, ciepłej wody o temp. maksymalnie 37°C.
- Należy delikatnie obracać butelkę lub torebkę „Pump & Save”, aby wymieszać tłuszcz, który się oddzielił. Należy unikać potrząśnięcia pokarmem oraz wzburzania go.

Przechowywanie i rozmrażanie pokarmu

- Nie przechowywać pokarmu na półkach drzwi lodówki. Należy w zamian wybrać najchłodniejsze miejsce w lodówce (jest to tylna część szklanej półki nad komorą warzyw).
- Odciągnięty pokarm można zamrozić w butelkach na mleko lub torebkach „Pump & Save”*. Nigdy nie należy napełniać butelek ani torebek powyżej 3/4 objętości, aby pozostawić miejsce na jej możliwe zwiększenie.
- Butelki lub torebki „Pump & Save” należy oznaczyć datą odciągnięcia.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżo odciągniętego pokarmu dla zdrowych niemowląt urodzonych o czasie

Zawartość opakowania

3 Butelki 150 ml

Tworzywo: Polipropylen

Galeria

