

Medela Calma Zestaw butelka 150ml + smoczek



Cena: 71,42 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 zestaw
Producent	Medela
Rejestracja	
Zastosowanie	Aksesoria, Akcesoria dla dziecka, Karmienie dziecka

Opis produktu

Karmienie piersią jest najbardziej naturalnym i najzdrowszym sposobem podawania pokarmu dziecku. Calma to najnowsze innowacyjne rozwiązanie firmy Medela stosowane w karmieniu, które odpowiada ze zrozumieniem na potrzeby ssącego dziecka. Butelka ze smoczkiem o wolnym przepływie przypominającym kształtem pierś matki odpowiednia dla niemowląt od 1 miesiąca życia. Dzięki systemowi Calma pozwala na podtrzymanie u dzieci naturalnego odruchu ssania wyuczonego przy piersi. Umożliwia dziecku spokojne i regularne oddychanie. Gdy dziecko przestaje ssać, mleko zatrzymuje się dokładnie tak samo, jak podczas ssania piersi. Medela Calma wspiera przejście z piersi na smoczek i z powrotem

Ergonomiczny kształt pozwoli na samodzielne chwycenie jej przez dziecko. Szeroka szyjka umożliwi łatwe napełnianie i czyszczenie butelki, a niewielka ilość elementów sprawia, że jej montaż jest szybki i prosty. Przepływ, kształt i długość smoczka Calma zostały dobrane tak, aby spełniać potrzeby Twojego dziecka w miarę jego rozwoju. Jeden rozmiar oraz kształt wystarcza na cały okres karmienia.

Zalety

Rozwiązanie Calma firmy Medela to opcja zaprojektowana specjalnie dla matek, które chcą karmić dziecko odciągniętym z piersi pokarmem. Calma pozwala dziecku ssać, przełykać i oddychać w naturalny sposób:

- dziecko może pobierać pokarm, oddychać i robić przerwy w naturalnym rytmie, dzięki czemu jest spokojne
- dziecko musi wytworzyć podciśnienie, aby umożliwić przepływ mleka
- dziecko może zachować swój naturalny odruch ssania .

Wskazania

Calma jest przeznaczona do karmienia zdrowych niemowląt mlekiem matki. Firma Medela nie zaleca stosowania Calmy do sztucznych mieszanek.

Mycie

Myc wszystkie części w wodzie z detergentem bezpośrednio po użyciu w celu uniknięcia zasychnięcia pozostałości mleka oraz zapobiegania rozwojowi bakterii.

- Do mycia używać wyłącznie wody pitnej.
- Nie czyścić elementów systemu Calma ostrym ani twardym przedmiotem takim jak szczotka, wykałaczka czy ostre paznokcie.
- Mycie Calmy w zmywarce do naczyń może spowodować odbarwienie się niektórych części. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.
- Nie dotykać wnętrza umytych części, aby uniknąć zanieczyszczenia .

Przed pierwszym użyciem

- Wypłukać wszystkie elementy w zimnej wodzie (o temp. ok. 20°C), następnie umyć je delikatnie dużą ilością ciepłej wody z mydłem o temp. ok. 30°C.
- Wypłukać ponownie w zimnej wodzie o temp.ok. 20 °C przez 10–15 sekund .
- Zanurzyć wszystkie elementy w wodzie i gotować przez pięć minut . Można również użyć torebek do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej Quick Clean

zgodnie z instrukcją.

- Osuszyć wszystkie części za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić do wyschnięcia na czystej ściereczce .

Po każdym użyciu

- Wypłukać wszystkie części w zimnej wodzie o temp. ok. 20°C, następnie umyć je delikatnie dużą ilością ciepłej wody z mydłem o temp. ok. 30°C.
- Wypłukać ponownie w zimnej wodzie o temp.ok. 20 °C przez 10–15 sekund .
- Osuszyć wszystkie części za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić do wyschnięcia .
- Metodą alternatywną dla poprzednich kroków jest umycie systemu Calma w zmywarce do mycia naczyń. W przypadku mycia Calmy w zmywarce elementy składowe należy umieścić w górnym koszu lubw sekcji przeznaczonej na sztućce .

Raz dziennie

- Zanurzyć wszystkie elementy w wodzie i gotować przez pięć minut . Można również użyć torebek do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej Quick Clean zgodnie z instrukcją .
- Osuszyć wszystkie części za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić do wyschnięcia na czystej ściereczce .

Ważne

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Medela. Sprawdzić przed każdym użyciem: rozciągnąć przezroczysty element silikonowy we wszystkich kierunkach, aby sprawdzić, czy nie został uszkodzony. Wadliwy element należy wyrzucić po wystąpieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub osłabienia .

Jest to produkt przeznaczony dla jednej osoby. Używanie przez więcej niż jedną osobę może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Produkowany w Szwajcarii z materiałów niezawierających bisfenolu A (BPA).

Ostrzeżenia

Nie podgrzewać mleka w kuchence mikrofalowej, gdyż może to spowodować nierównomierne ogrzanie i być przyczyną oparzenia dziecka.

Nigdy nie używać smoczków do karmienia jako środka uspokajającego. Nieprzerwane i długotrwałe ssanie powoduje próchnicę zębów

Przechowywanie

Zestaw Calma należy trzymać z dala od grzejników i otwartego ognia. Nie wystawiać Calmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wszystkie elementy, które nie są używane, należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać Calmę do następnego użycia w przewiewnym i czystym worku lub pojemniku lub przewiewnym i czystym papierze lub ściereczce.

Ze względów higienicznych zaleca się wymianę Calmy co 3 miesiące .

Zawartość opakowania

Butelka o pojemności 150 ml,

Silikonowy smoczek z wolnym przepływem.

Pokrywka smoczka,

Nakładka (system kontroli przepływu z membraną),

Podstawa (system kontroli dopływu powietrza),

Multinakrętka Calma.

Galeria

