

Medela PersonalFit Flex Lejek S 21 mm



Cena: 45,52 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	2 sztuki
Producent	MEDELA POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Akcesoria

Opis produktu

Lejek PersonalFit Flex wielokrotnego użytku jest kompatybilny z laktatorami firmy Medela –Swing Maxi Flex, Swing Flex i Freestyle Flex. Lejki PersonalFit Flex dostępne są w różnych rozmiarach .

Nowy lejek PersonalFit Flex™ został zaprojektowany we współpracy z zespołem naukowców oraz matkami karmiącymi piersią. Jego konstrukcja łatwo dopasowuje się do kształtu ciała i wspomaga przepływ mleka, zapobiegając uciskowi kanałków mlecznych.

Zalety:

- Kąt rozwarcia 105° umożliwia lepsze dopasowanie i ułatwia przepływ mleka
- Owalny kształt z możliwością obrotu o 360°
- Miękką, gładką i elastyczną krawędź
- Cztery rozmiary tuneli – dobierz odpowiednią wielkość na podstawie przewodnika.
- Wykonanie z materiałów niezawierających bisfenolu A (BPA)

Wskazania

Lejek przeznaczony jest do kontaktu z piersią i brodawką sutkową kobiety oraz do podłączenia do zestawu konektora PersonalFit PLUS i PersonalFit Flex, aby umożliwić wytworzenie podciśnienia niezbędnego do odciągania pokarmu oraz odprowadzenie odciągniętego mleka matki do zestawu konektora.

Sposób użycia

- Przed dotykaniem piersi należy starannie umyć ręce w wodzie pitnej z mydłem.
- Przetrzeć piersi wilgotną ściereczką. Nie używać mydła ani alkoholu, bo mogą one wysuszyć skórę i spowodować pęknięcie brodawek sutkowych.
- Połączyć lejek z uchwytem wybranego zestawu do odciągania Medela. Upewnić się, czy lejek i uchwyt są należycie zamocowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zestawu do odciągania i laktatora, patrz ich instrukcje obsługi

Mycie i dezynfekcja

- Należy wykonać wszystkie czynności opisane w instrukcji użytkowania laktatora pokarmu Medela – rozkładanie, mycie, dezynfekcja.
- Lejek oczyścić natychmiast po użyciu w celu uniknięcia zasychania pozostałości mleka oraz zapobiegania namnażaniu się bakterii.
- Do mycia używać wyłącznie wody pitnej.
- Uważać, aby nie uszkodzić części podczas czyszczenia szczoteczką.
- Nie używać płynów do mycia naczyń oraz detergentów o działaniu ściernym do czyszczenia laktatora pokarmu lub elementów zestawu.
- Rozłożyć zestaw do odciągania na części.

Mycie – przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu

- Wszystkie elementy opłukać w zimnej, czystej wodzie pitnej o temp. ok. 20°C.
- Umyć wspomniane elementy dużą ilością ciepłej wody z mydłem o temp. ok. 30°C. Użyć dostępnego na rynku płynu do mycia naczyń, najlepiej bez sztucznych substancji zapachowych i barwników o neutralnym pH.
- Opłukać części w zimnej, czystej wodzie pitnej przez 10-15 sekund o temp. ok. 20°C. Osuszyć.

Dezynfekcja – przed pierwszym użyciem i raz dziennie

- Zanurzyć lejek w wodzie i gotować przez co najmniej pięć minut. Rozwiązaniem alternatywnym dla wygotowywania jest użycie torebek Quick Clean w kuchenke mikrofalowej zgodnie z instrukcjami.

Osuszanie

- Osuszyć za pomocą czystej ściereczki lub pozostawić na czystej ściereczce do wyschnięcia.

Przechowywanie

Umyte i wysuszone części umieścić w czystym worku do przechowywania lub w czystym otoczeniu. Nie przechowywać elementów zestawu w hermetycznym pojemniku/worku, jeżeli są one wilgotne. Ważne, aby pozostała wilgoć odparowała.

Ważne

Rozmiary lejków Medela-jak dobrać rozmiar:

-Za pomocą linijki lub centymetra zmierz w milimetrach (mm) średnicę brodawki sutkowej u jej podstawy (przez środek). Nie uwzględniaj otoczki.

-Na podstawie dokonanego pomiaru dopasuj odpowiedni rozmiar lejka Medela. Przykład: jeżeli średnica Twojej brodawki to 16 mm, zalecany jest wybór lejka Medela o rozmiarze 21 mm.

Rozmiar lejka może zmieniać się podczas całego okresu odciągania pokarmu. Przez cały czas lejek musi być odpowiednio dopasowany. Dobrze dopasowany lejek pomaga uniknąć niepotrzebnego ucisku przewodów mlecznych podczas odciągania, zapewnia optymalne opróżnianie piersi oraz maksymalną ilość mleka. W prawidłowo dopasowanym lejku brodawka znajduje się na środku tunelu i porusza się swobodnie

Ostrzeżenia

- Lejek jest produktem przeznaczonym do użytku osobistego i może być używany tylko przez jedną osobę. Nie powinien być współdzielony przez matki.
- Stosować tylko oryginalne akcesoria firmy Medela.
- Sprawdzić przed każdym użyciem. Uszkodzone, zużyte lub skażone pleśnią elementy należy wymienić.
- Opakowania ani elementów nigdy nie pozostawiać bez nadzoru. Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Zbyt mocne dociskanie lejków do piersi może wpłynąć na przepływ odciąganego pokarmu.
- W przypadku wystąpienia problemów lub bólu w czasie odciągania należy skonsultować się ze specjalistą ds. karmienia piersią.

Zawartość zestawu

Lejek PersonalFit Flex™ S Ø 21 mm 2 sztuki,

Instrukcja obsługi PersonalFit Flex™

Materiał lejka - polipropylen, elastomer termoplastyczny

Galeria

