

Medela Torebki do przechowywania pokarmu 50 sztuk



Cena: 61,58 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	50 torebek
Producent	Medela
Rejestracja	
Zastosowanie	Przechowywanie pokarmu

Opis produktu

Torebki firmy Medela do przechowywania pokarmu umożliwiają kolekcjonowanie zapasu mleka matki w lodówce lub zamrażarce, dzięki czemu dziecko nie musi być karmione pokarmem zastępczym. Gotowe do użycia torebki umożliwiają przechowywanie, transport oraz podgrzewanie mleka matki w wygodny i higieniczny sposób. Torebki wyposażone zostały w szczelne, podwójne zamknięcie strunowe zabezpieczające przed przeciekaniem. Zajmują mniej miejsca niż tradycyjne butelki na pokarm. Płaski kształt torebek zapewnia szybkie rozmrażanie pokarmu, a wytrzymały materiał zapewnia bezpieczne przechowywanie.

Torebki te, wykonane z materiałów niezawierających BPA dopuszczonych do kontaktu z żywnością, są zgrzewane termicznie, co zabezpiecza je przed rozdarcie lub pęknięciem. Każda torebka zawiera etykietę z miejscem na opis i datę.

Zalety

- Podwójne zamknięcie strunowe i podwójne ścianki zabezpieczają przed przeciekaniem
- Krawędzie zgrzewane termicznie chronią przed rozdarcie, rozwarstwieniem lub pęknięciem
- Torebki można ustawić w pozycji stojącej, co ułatwia użytkowanie, lub ułożyć płasko podczas przechowywania
- W zestawie znajduje się torba transportowa, pozwalająca utrzymać porządek i zachować czystość
- Bez BPA .

Sposób użycia

Higiena

- Przed dotknięciem torebki należy dokładnie umyć ręce wodą pitną z mydłem, a następnie osuszyć je czystym ręcznikiem lub ręcznikiem jednorazowym.
- Nie należy dotykać wnętrza woreczka.
- Torebki na odciągnięte mleko matki Medela przeznaczone są wyłącznie do użytku jednorazowego – jest to ważne z punktu widzenia higieny.
- Nie należy używać ponownie tej samej torebki, ponieważ może to prowadzić do zakażenia krzyżowego.

Zamrażanie

- Torebki doskonale nadają się mrożenia mleka matki. Są one odporne na zamrażanie, gotowe do użycia i łatwe do oznakowania -wystarczy zapisać odpowiednie informacje z przodu woreczka, aby łatwo kontrolować daty odciągnięcia pokarmu.
- Należy pamiętać , że mleko , podobnie jak każda inna ciecz zwiększa swoją objętość po zamrożeniu. Nie należy napełniać torebek poza wyraźnie

oznakowany poziom 180 ml.

- Dzięki płaskiemu kształtowi woreczki z łatwością mieszczą się w zamrażarce, a rozmrażanie ich zawartości nie trwa długo.

Rozmrażanie

- Aby zapobiec utracie witamin, minerałów i innych istotnych składników mleka matki, należy zawsze rozmrażać torebkę z pokarmem w lodówce.

Rozmrażanie trwa około ośmiu godzin, należy pamiętać o uwzględnieniu czasu potrzebny na to .

-Nie należy próbować przyspieszyć tego procesu poprzez podgrzewanie woreczka w mikrofalówce lub w garnku z gotującą się wodą, ponieważ metody te mogą wywoływać miejscowy wzrost temperatury, a tym samym ryzyko poparzenia.

Podgrzewanie

Dziecko chętnie przyjmie odciągnięty pokarm utrzymany w temperaturze ciała, ponieważ najbardziej przypomina on mleko pochodzące bezpośrednio z piersi. Podgrzewanie pokarmu w woreczku na mleko matki Medela jest bardzo łatwe: należy umieścić torebkę w misce z ciepłą wodą lub w podgrzewaczu do butelek albo włożyć ją pod bieżącą wodę o temperaturze maksymalnej 37°C czyli równowartości temperatury ciała.

Ważne

Wszystkie woreczki na mleko matki posiadają podwójne zamknięcie strunowe i podwójne ścianki, a ich spoiny są zgrzewane, co zapobiega ich rozdarciu, rozklejaniu lub pękaniu. Odciągnięte mleko matki przechowywane w temperaturze pokojowej jest bezpieczne do spożycia przez cztery godziny. Jeśli konieczny jest dłuższy transport (do ośmiu godzin), konieczne będzie umieszczenie woreczków w torbie chłodzącej z wkładami chłodzącymi.

Zawartość opakowania

50 woreczków

Torba transportowa

Materiał: LDPE (polietylen o niskiej gęstości) / PET (politereftalan etylenu).

Galeria

