

MICROLIFE BP W90 Ciśnieniomierz nadgarstkowy

Cena: 141,26 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Postać	Ciśnieniomierz nadgarstkowy
Producent	MICROLIFE AG
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Pomiar ciśnienia

Opis produktu

Ciśnieniomierz BP W90 jest automatycznym ciśnieniomierzem nadgarstkowym. Urządzenie umożliwia niezależne zapisywanie 99 wyników pomiarów dla dwóch użytkowników. Dodatkowo może pracować w trybie „gość”, w którym wyniki pomiarów nie są zapisywane. Technologia IHB umożliwia wykrywanie nieregularnej pracy serca. Przyrząd pozwala na ustawienie 2 czasów włączenia alarmu. Można je wykorzystać jako przypomnienie o przyjmowaniu leków.

Wszystkie ciśnieniomierze Microlife zostały przebadane klinicznie pod kątem specjalnych grup pacjentów, takich jak cukrzyca, schyłkowa niewydolność nerek, ciąża i stan przedrzucawkowy, niedociśnienie i dzieci (od 12 roku życia).

Wskazania

Pomiar ciśnienia krwi i pulsu w warunkach domowych.

Ważne

- Przed zastosowaniem produktu należy się zapoznać z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.
- Na 30 minut przed pomiarem nie wolno: palić tytoniu, pić kawy, jeść, podejmować aktywności fizycznej.
- Nie należy mierzyć ciśnienia jeżeli jest się pod wpływem stresu.
- Przed dokonaniem pomiaru należy odpocząć co najmniej 15 minut.
- W celu wykonania pomiaru należy usiąść w pozycji wyprostowanej, opierając plecy na krześle. Rękę należy umieścić na stole.
- Podczas pomiaru nie należy się ruszać ani krzyżować nóg.
- Zaleca się zapisywanie wyników pomiaru.

Zalety ciśnieniomierza

- IHB – wykrywanie nieregularnej pracy serca.
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD.
- Pamięć 99 wyników pomiaru dla każdego z dwóch użytkowników.
- Łatwiejsze śledzenie wyników dzięki dacie i godzinie pomiaru.
- Czytelna klasyfikacja wyników pomiaru ciśnienia dzięki wskaźnikowi
- Alarm przypominający o pomiarze.
- Etui do transportu
- Gwarancja 5 lat “door to door”. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez stronę <https://serwis.chde.pl/>.

Specyfikacja techniczna

- Warunki pracy: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 %
- Warunki przechowywania: -20 – +55 °C / -4 – +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 %
- Waga: 277 g (z bateriami)
- Wymiary: 68 x 68 x 70 mm
- Rozmiar mankietu: 13,5 x 21,5 cm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 – 280 mmHg – ciśnienie krwi

40 – 200 uderzeń na minutę – tętno

- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 – 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 2 x 1,5 V baterie alkaliczne; AAA
- Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Żywotność baterii: Około 460 pomiarów (nowe)
- Klasa IP: IP20
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Zawartość opakowania

- Ciśnieniomierz nadgarstkowy Microlife BP W90,
- komplet baterii,
- etui,
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Przechowywanie

Należy chronić ciśnieniomierz przed :

- wodą i wilgocią,
- ekstremalnymi temperaturami,
- wstrząsami i upadkiem,
- zanieczyszczeniem i kurzem,
- światłem słonecznym,
- upałem i zimnem.

Producent

Microlife AG .
Espenstrasse 139
9443 Widnau / Szwajcaria

Dystrybutor

CHDE Polska S.A
ul. Biesiadna 7
35-304 Rzeszów

Galeria

