

MICROLIFE NEB 210 Inhalator kompresorowy

Cena: 154,22 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 zestaw
Postać	Inhalator kompresorowy
Producent	SHENZHEN BI-RICH MEDICAL DEVICES CO LTD
Rejestracja	
Zastosowanie	Inhalacje

Opis produktu

NEB 210 to najnowszy inhalator w rodzinie produktów Microlife. Dzięki doskonałej specyfikacji zapewnia najwyższe standardy leczenia dróg oddechowych. Mały rozmiar cząstki, wysokie tempo nebulizacji z możliwością regulacji oraz jedna z najwyższych na rynku frakcji respirabilnych gwarantuje skuteczne leczenie w chorobach płuc. Inhalator NEB 210 doskonale inhaluje leki kortykosteroidowe, zawiesiny czy roztwory z hialuronem.

Zalety inhalatora

- Cykl pracy 30 min praca / 30 min spoczynek
- Wydajność inhalacji 0,40 ml / min
- Rozmiar cząstek 2,08 µm (MMAD)
- Frakcja respirabilna 95,8% FPF
- Nadaje się do inhalacji kortykosteroidami czy roztworami z hialuronem
- Akcesoria można myć i dezynfekować
- W zestawie pojemnik na lek, przewód powietrzny, ustnik, maska dla dzieci, maska dla dorosłych, końcówka do nosa, filtry
- Gwarancja 5 lat "door to door". Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez stronę <https://serwis.chde.pl/>

Właściwości

Inhalator NEB 210 nadaje się do inhalacji kortykosteroidami czy roztworami z hialuronem. Posiada regulowane tempo nebulizacji dla indywidualnej terapii. Wysokowydajny system nebulizacji optymalizuje efekty terapeutyczne

Wskazania

Microlife Inhalator kompresorowy NEB 210 to urządzenie medyczne wskazane do użytku domowego w terapii wziewnej w procesie leczenia i profilaktyce chorób dróg oddechowych. Może być stosowany przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Sposób użycia

Używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Skrócona instrukcja obsługi:

-Zmontować zestaw do inhalacji. Należy zwrócić uwagę czy dostępne są wszystkie części.

- Napełnić komorę środkiem inhalacyjnym, pilnując by nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia komory.
 - Połączyć zestaw inhalujący z przewodem powietrznym do kompresora i podłączyć wtyczkę do sieci (230V 50 Hz AC).
 - Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić przełącznik ON / OFF w pozycji «I».
- Zaleca się, aby w trakcie inhalacji siedzieć prosto i być zrelaksowanym. Nie należy leżeć podczas inhalacji. W razie pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać inhalację.
- Po zakończeniu inhalacji, w czasie zalecanym przez lekarza, należy wyłączyć urządzenie. W tym celu powinno się ustawić przełącznik w pozycji «O» i odłączyć wtyczkę od zasilania.
 - Na koniec, zestaw inhalacyjny należy opróżnić z resztek leku a samo urządzenie wyczyścić.

Ważne

Przed zastosowaniem produktu należy się zapoznać z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania.

Specyfikacja techniczna

- Wydajność aerozolu: 0,40 ml/min. (NaCl 0.9%)
- Frakcja respirabilna: 95,8% < 5 µm
- Wielkość cząstek 2,08 µm (MMAD)
- Maksymalny swobodny przepływ powietrza: 15 l/min.
- Operacyjny przepływ powietrza: 5-8 l/min.
- Odgłos pracy: 51,5 dBA
- Zasilanie elektryczne: 230V 50 Hz AC
- Długość kabla sieciowego: 1,8 m
- Pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 8 ml
- Ilość osadu: 0,8 ml
- Tryb pracy: 30 min. pracy / 30 min. odpoczynku
- Warunki pracy: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 %
- 700 – 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
- Warunki i transportu przechowywania: -20 – +60° C / -4 – +140 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 – 95% 700 – 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
- Waga: 1200 g
- Wymiary: 160 x 161 x 90 mm
- Klasa IP: IP21
- Normy: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-2; EN 60601-1-6; IEC 60601-1-11

Zawartość opakowania

Urządzenie główne Inhalator Microlife NEB 210.

1 x maseczka dla dorosłych.

1 x maseczka dla dzieci.

1 x przewód powietrzny.

Pojemnik na lek.

Ustnik.

Końcówka do nosa.

5 sztuk filtrów powietrza.

Pokrowiec na inhalator.

Producent

Microlife AG .

Espenstrasse 139

9443 Widnau / Szwajcaria

Dystrybutor

CHDE Polska S.A

ul. Biesiadna 7

35-304 Rzeszów

Galeria

