

Multi-Mam Kompresy do pielęgnacji sutków



Cena: 47,24 zł

Opis słownikowy

| | |
|--------------|--|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie | 12 kompresów |
| Producent | BIOCLIN |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Zastosowanie | Aksesoria dla mamy, Karmienie piersią, Pielęgnacja po porodzie |

Opis produktu

Jest to kompleksowa pielęgnacja piersi karmiącej mamy

- bezpośrednio łagodzi podrażnienia brodawek sutkowych
- neutralizuje szkodliwe mikroorganizmy
- zapobiega infekcjom, m.in. zapaleniu piersi
- zapewnia optymalny stan skóry
- naturalny, bezpieczny i nieszkodliwy nawet w przypadku połknięcia
- wspomaga naturalne procesy gojenia .

Kompresy Multi-Mam to nowoczesne podejście do leczenia bolesnych brodawek sutkowych. Preparat nasączony jest bioaktywnym żelem opartym na kompleksie 2QR, który nakłada się jednocześnie z kompresem przywraca równowagę mikroflory i wspomaga naturalne procesy gojenia. Kompresy Multi-Mam pakowane są pojedynczo. Kompresy Multi-Mam są niewchłaniane i laminowane, nasączone bioaktywnym żelem. Nie zawiera konserwantów.

Wskazania

- Utrzymanie optymalnego stanu skóry wokół sutka .
- Zapobieganie infekcjom - zapaleniu piersi .
- Bolesne i spękanie sutki /
- Szybkie łagodzenie opuchlizny i podrażnień .

Składniki:

krospolimer galaktoarabianianu, kwas poliglukuronowy (kompleks 2QR: opatentowane bioaktywne polisacharydy), gliceryna (pochodzenia roślinnego), guma ksantanowa.

Sposób użycia

- Przemyj ręce oraz piersi letnią wodą, a następnie delikatnie osusz.
- Otwórz saszetkę, rozwiń kompres i przyłóż nasączoną żelem stroną do bolącej brodawki sutkowej.

- Pozostaw kompres na min. 10 minut, ale nie dłużej niż godzinę. Optymalny czas korzystania z kompresu wynosi 30 minut.
- Po użyciu, wyrzuć kompres.
- Nie musisz usuwać nadmiaru żelu przed rozpoczęciem karmienia piersią – formuła jest całkowicie bezpieczna dla dziecka.

Stosuj co najmniej dwa razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.

Ważne

Uczulenia na składniki Kompresów Multi-Mam są bardzo rzadkie. W przypadku wątpliwości, nałożyć kompres na wewnętrzną stronę przedramienia. Jeśli wystąpi swędząca czerwona wysypka zalecamy nie stosować kompresów Multi-Mam.