

Nollix spray 10ml

Cena: 37,44 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 ml
Postać	spray do nosa
Producent	QPHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Zastosowanie	Nawilżanie nosa

Opis produktu

Nollix to naturalny preparat przynoszący ulgę w suchości błon śluzowych nosa o różnym podłożu. Rozpyla się w formie „mgiełki”, dzięki czemu precyzyjnie i równomiernie nawilża, uelastycznia błonę śluzową nosa oraz łagodzi podrażnienia.

Wskazania

Nollix może być stosowany we wszelkich stanach suchości błon śluzowych nosa, polecany szczególnie przy:

- alergii,
- suchości błon śluzowych nosa pochodzenia farmakologicznego,
- suchości błon śluzowych w przebiegu infekcji,
- suchości błon śluzowych nosa wywołanych przebywaniem w zanieczyszczonym środowisku, ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach,
- ścieńczeniu błon śluzowych.

Skład

olej oliwkowy rafinowany, octan DL-alfa-tokoferylu.

Sposób użycia

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 dawka do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie.
- Dzieci od 3. do 12. roku życia: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2-3 razy dziennie.
- Przed zastosowaniem oczyścić dokładnie nos.
- Ogrzać buteleczkę w dłoni i wstrząsnąć.
- Zdjąć plastikową zatyczkę, wprowadzić aplikator do otworu nosowego i nacisnąć.
- Następnie powtórzyć w drugim otworze.
- Po użyciu dokładnie oczyścić aplikator i założyć plastikową zatyczkę.
- Po aplikacji nie stosować i nie płukać nosa żadnym innym płynem przez 30 minut.
- Najlepsze efekty otrzymuje się po 10-14 dniach ciągłego stosowania.
- Jedno opakowanie przeznaczone jest dla jednego pacjenta.

Stosowanie z innymi lekami

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami/wyrobami medycznymi. Nie należy jednak stosować żadnych innych leków/wyrobów medycznych/płynów do nosa przez okres 30 minut po aplikacji wyrobu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma przeciwwskazań do stosowania wyrobu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przyjmowanie wyrobu nie wpływa na sprawność psychomotoryczną.

Przechowywanie

- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w pozycji pionowej.
- Przechowywać w temp. 15-25oC.

Podmiot odpowiedzialny

Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa,
tel. (022) 590 57 00, fax (022) 590 57 01,
qpharma@qpharma.pl, www.qpharma.pl