

# POSIFORLID Chusteczki do higieny powiek 20 sztuk

Cena: 34,65 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	20 szt.
Postać	chusteczki
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Działanie:

Chusteczki do higieny powiek POSIFORLID® nasączone, hialuronianem sodu, ekstraktem skrzypu polnego i świetlika pomagają delikatnie oczyszczać i pielęgnować wrażliwą skórę powiek. Chusteczkami można delikatnie usuwać zaschniętą wydzielinę, kurz i pyłki, które gromadzą się na powiekach i między rzęsami.

### Sposób użycia:

1. Przed użyciem chusteczek do higieny powiek POSIFORLID® należy zmyć makijaż.
  2. Przed użyciem chusteczek do higieny powiek umyć ręce.
  3. Wyjąć chusteczkę do higieny powiek z opakowania jednostkowego.
  4. Delikatnie oczyścić powiekę, trzymając oko zamknięte, przesuając chusteczkę po powiece od zewnętrznego kącika oka do wewnątrz.
  5. Zużyta chusteczka do higieny powiek należy wyrzucić (nie wrzucać do toalety).
  6. Powtórzyć zabieg na drugim oku, używając świeżej chusteczki do higieny powiek.
- Zaleca się regularną higienę powiek rano i wieczorem.  
Chusteczki do higieny powiek POSIFORLID® można też stosować kilka razy dziennie.  
Czas stosowania chusteczek do higieny powiek POSIFORLID® nie jest ograniczony.