

PREL® BLUE Plaster chłodzący 3 sztuki

Cena: 19,98 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	3 sztuki
Postać	Plaster
Producent	GENEXO SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Plaster chłodzący

Opis produktu

Hydrożelowy plaster chłodzący najnowszej generacji, oparty na innowacyjnej formule Hydronique. Zmniejsza obrzęki i łagodzi ból. Stosowany w stłuczeniach, sińcach, skręceniach, obrzękach pourazowych. Dzięki hydrożelowej formule Hydronique, plastry PREL® blue :

- pozwalają aktywnemu składnikowi (mentolowi) łatwo wnikać w głębsze warstwy skóry ,
- zapewniają szybki efekt ,
- gwarantują bezbolesne usuwanie,
- nie powodują oparzeń ani podrażnień,
- pozwalają skórze oddychać.

PREL® blue – plaster hydrożelowy z mentolem jest produktem najnowszej generacji, posiadającym innowacyjny hydrożelowy system Hydronique®, będący nośnikiem mentolu. Hydrożelowa formuła sprawia, że jest on łatwy w użyciu, lepiej przylega do skóry oraz w przeciwieństwie do zwykłego plastra nie wysusza skóry, zapewniając jej ciągłe oddychanie i nawilżanie. Okład stosuje się miejscowo na skórę w celu złagodzenia napięcia i bólów mięśni. Zawarty w nim mentol, poprzez swoje chłodzące działanie, zmniejsza obrzęki pourazowe oraz działa kojąco w bólach stawowo-mięśniowych m.in. barków, pleców i karku. Okład stosuje się wspomagająco w: obrzękach pourazowych, sińcach, nadwyrężeniach i naciągnięciach mięśni, zapaleniu ścięgien, zapaleniu kaletki stawowej, bólach o niewielkim nasileniu w okolicy stawów, kurczach mięśniowych. Okład nie brudzi ubrania, jest pod nim niewidoczny. Bardzo łatwo go usunąć z powierzchni skóry, nie wywołując przy tym efektu depilacji.

Wskazania

Prel® Blue jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Jest stosowany jako środek wspomagający w:

- obrzękach pourazowych
- stłuczeniach, sińcach
- skręceniach
- nadwyrężeniach i naciągnięciach mięśni
- zapaleniach ścięgien

- zapaleniach kaletki stawowej
- bólach o niewielkim nasileniu w okolicy stawów
- bólach pleców
- kurczach mięśniowych.

Składniki

Mentol 5%, gliceryna, kaolin.

Sposob użycia

- Odciąć fragment plastrac o wielkości dopasowanej do powierzchni i umiejscowienia bólu.
- Następnie należy zerwać folię ochronną.
- Nałożyć klejącą stronę plastra na umytą i osuszoną skórę.
- Pozostawić na skórze na maksymalnie 8 godzin.
- W razie konieczności powtórzyć stosowanie, jednak nie częściej jednak niż 4 razy na dobę.

Ważne

- Polecany jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.
- W przypadku dzieci młodszych można stosować po konsultacji lekarskiej.
- Stosowanie w czasie ciąży i karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem.
- Jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry.
- Przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie należy stosować jednocześnie z ogrzewającymi poduszkami elektrycznymi.
- Nie stosować okładu w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik plastra. Jeżeli pojawi się zaczerwienienie, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować plastra bezpośrednio na rany ani na podrażnioną oraz uszkodzoną skórę.
- Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą.
- Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu plastra.

Zawartość opakowania

3 plastry o wielkości 8x 12 cm

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

GENEXO
Gen. Józefa Zajęczka 26
Warszawa