

# Sunstar GUM® Ortho Wosk ortodontyczny miętowy 724



Cena: 7,06 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Wosk ortodontyczny
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Zastosowanie	Akcesoria, Aparaty ortodontyczne

## Opis produktu

Dyskomfort i podrażnienia mogą być odczuwane przez pacjentów podczas noszenia aparatów ortodontycznych i wynikają z powtarzającego się tarcia aparatów o tkanki błony śluzowej jamy ustnej.

GUM® Ortho Wosk jest to wyrób medyczny klasy I, który został opracowany specjalnie w celu ochrony tkanek błony śluzowej jamy ustnej przed zmianami chorobowymi i łagodzenia podrażnień wywołanych przez aparaty ortodontyczne. Wstępnie wycięte kawałki wosku ortodontycznego mogą być nakładane poprzez delikatne wciśnięcie na druty lub zamki i dzięki temu wosk stworzy barierę ochronną i zwiększy poziom komfortu pacjentów.

GUM® Ortho Wosk to wosk ortodontyczny, który składa się z 5 naciętych pasków wosku umieszczonych na papierze woskowanym w plastikowym etui.

Dostępny w wersji bezsmakowej lub miętowej

### Właściwości

- GUM® Ortho Wosk chroni tkanki błony śluzowej jamy ustnej przed podrażnieniami spowodowanymi przez aparaty ortodontyczne
- Został przygotowany w łatwych do użycia, wstępnie pociętych kawałkach umieszczonych na papierze woskowanym.
- Jest przezroczysty, bezsmakowy i bezpieczny.
- Może pozostać na aparacie przez wiele godzin po aplikacji - można jeść i pić.
- Jest łatwy do usunięcia - można to zrobić w czasie szczotkowania zębów.
- Na odwrocie blistra znajduje się lustro umożliwiające aplikację w dowolnym czasie.

### Wskazania

GUM® Ortho Wosk został opracowany w celu ochrony tkanek błony śluzowej jamy ustnej przed uszkodzeniami oraz w celu łagodzenia podrażnień wywołanych przez aparaty ortodontyczne. Może być stosowany w zależności od potrzeb, zarówno profilaktycznie jak i w przypadku aparatów powodujących podrażnienia.

Można go stosować przez 30 kolejnych dni.

W przypadku utrzymywania się zmian lub podrażnień należy skonsultować się z lekarzem ortodontą.  
**GUM® Ortho Wosk jest przeznaczony do stosowania przez dorosłych i dzieci od 7 lat pod nadzorem osoby dorosłej.**

#### Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników zawartych w produkcie.

#### Składniki

Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin, Liquid Wax.

#### Sposób użycia

- Należy umyć i dokładnie osuszyć ręce.
- Następnie należy wysuszyć miejsce aplikacji po to , aby uzyskać optymalną przyczepność.
- Po oderwaniu kawałka wosku GUM® Ortho należy ogrzać i uformować go pomiędzy palcami.
- Następnie , poprzez delikatne naciśnięcie nałożyć go na druty i zamki powodujące dyskomfort.
- Wosk należy usunąć przed jedzeniem lub myciem zębów.
- Następnie należy nałożyć nowy kawałek wosku.
- Można zostawić wosk na aparacie przez całą noc.
- Zużyty wosk należy wyrzucić do odpadów domowych.

#### Ważne

- GUM® Ortho Wosk jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w jamie ustnej.
- Nie należy go połykać.
- Nie należy używać po upływie daty ważności.
- Nie należy używać wosku jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Ponieważ GUM® Ortho Wosk nie został przebadany u kobiet w ciąży i karmiących piersią to przed jego zastosowaniem należy zasięgnąć porady lekarza.

#### Przechowywanie

GUM® Ortho Wosk można przechowywać w temperaturze od+5 do +40°C. Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Należy używać go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Sunstar Suisse S.A.  
Route de Pallatex 11,  
1163 Etoy  
Switzerland