

# TEST AMNIOCHECK wykrywający wyciek wód płodowych



Cena: 99,79 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	1 zestaw
Opakowanie	5 wkładek
Postać	Test in vitro
Producent	Prima Lab SA
Rejestracja	
Zastosowanie	Test diagnostyczny

## Opis produktu

Test Amniocheck do samokontroli jest zalecany jest dla kobiet ciężarnych znajdujących się zarówno w grupie wysokiego ryzyka, jak i spoza tej grupy.

Ponieważ wyciekające wody płodowe zwiększają ryzyko infekcji zarówno dla matki jak i płodu, dlatego wczesne wykrycie może:

- zapobiec powikłaniom lub przedwczesnemu porodowi
- pomóc w zidentyfikowaniu możliwego przerwania błon płodowych, zwłaszcza po amniopunkcji
- pomóc w potwierdzeniu odejścia wód płodowych, aby pacjentka mogła dotrzeć do szpitala na czas w celu bezpiecznego przeprowadzenia akcji porodowej.

Test Amniocheck zawiera 5 wkładek, które pod wpływem zmiany pH ( pH o wartości równej lub większej od 6.5 odpowiada pH wód płodowych ) zmieniają barwę na kolor niebieski lub zielony (o dowolnym natężeniu).

**Zmiana z koloru żółtego na niebieski lub zielony w którejkolwiek części wkładki świadczy o możliwym wycieku wód płodowych – należy to niezwłocznie skonsultować z lekarzem.**

Pasek pełniący funkcję wskaźnika we wkładce może zmienić barwę na niebieską też w przypadku infekcji pochwy – z tego powodu przy zmianie barwy wkładki jest ważny kontakt z lekarzem.

Wiele kobiet w ciąży odczuwa różnego rodzaju dolegliwości takie jak np.uczucie wilgotności w miejscu intymnym . Jest to często mylone z nietrzymaniem moczu lub infekcją. A może to być pierwszą oznaką wypływu wód płodowych i rozpoczynającym się porodem. Ponieważ każdy wcześniejszy wypływ płynu obwodowego jest niebezpieczny zarówno dla matki jak i dla dziecka. Test AMNIOCHECK na wyciek wód płodowych rozwiązuje problem z interpretacją odczuwanej wilgotności.

**Trzeba też pamiętać o tym , że o przedwczesnym odejściu wód płodowych mówi się wtedy, kiedy odejdą przed 38 tygodniem ciąży.**

Wkładki Amniocheck umożliwiają wykrycie sączenia wód płodowych już od 100 mikrolitrów płynu.

Test na wyciek płynu owodniowego Amniocheck ma wysoką czułość i swoistość – 97%

## Wskazania

Test Amniocheck jest zalecany dla kobiet ciężarnych znajdujących się zarówno w grupie wysokiego ryzyka, jak i spoza tej grupy.

### Sposób użycia

- Wkładka po wyjęciu z opakowania ma wskaźnik w kolorze jasnożółtym.
- Powinna zostać umieszczona w bieliznie - może być noszona jak zwykła wkładka do 12 godzin- bezpośrednio przy pochwie.
- Jeśli poczuje się wyciek płynu to wtedy należy wyjąć wkładkę i odczekać 15 minut.
- Po upływie 15 minut należy sprawdzić ,czy kolor wkładki uległ zmianie.

### Odczyt wyniku

- Odczytu wyniku należy dokonać po upływie 15 minutach od chwili wyjęcia wkładki z bielizny.
- Wkładka pod wpływem zmiany pH (podwyższone pH charakteryzuje się przy wycieku wód płodowych w odróżnieniu od moczu) zmieniają barwę na niebieski lub zielony- przy czym natężenie koloru może być dowolne.
- **Zmiana z koloru żółtego na niebieski lub zielony w którejkolwiek części wkładki świadczy o możliwym wycieku wód płodowych – należy to niezwłocznie skonsultować z lekarzem.**
- Pasek , który pełni funkcję wskaźnika we wkładce może również zmienić barwę na niebieską w przypadku infekcji pochwy.
- Przy zmianie barwy wkładki ważny jest kontakt z lekarzem.

### Ważne

- Przy jakiegokolwiek zmianie barwy wkładki ważny jest kontakt z lekarzem.
- Nie należy używać wkładek jeśli minął termin ich ważności.
- Wkładki pakowane są pojedynczo .
- Każda wkładka znajduje się w osobnej w saszetce.

### Zawartość opakowania

- 5 osobno zapakowanych wkładek
- instrukcja w języku polskim.

### Przechowywanie

Wkładki należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Aby uniknąć zanieczyszczenia, do czasu użycia wkładkę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

### **Producent**

Prima Lab SA  
Via Antonio Monti 7  
CH-6828 Balerna, Szwajcaria

### **Dystrybutor**

Farmabol Sp. z o.o.  
ul. T. Ociepki 4  
34-600 Limanowa

Galeria

