

Test ciążowy DIATHER strumieniowy 1 szt.



Cena: 5,50 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 szt.
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	

Opis produktu

W zestawie:

Saszетка z testem strumieniowym – 1 szt., instrukcja obsługi.

Działanie:

Test ciążowy do domowego użytku. Test ciążowy hCG strumieniowy FHC-103H służy do oznaczania poziomu hCG w moczu. Pozwala potwierdzić lub wykluczyć zapłodnienie komórki jajowej. Test zaleca się przeprowadzić w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki, najlepiej wykonywać go po przebudzeniu z próbki porannego moczu. Jest niezwykle prosty do wykonania, wystarczą trzy minuty, aby poznać wynik. Po zapłodnieniu rozpoczyna się produkcja hormonu hCG, czyli ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej. Test ciążowy hCG strumieniowy FHC-103H jest wyjątkowo czuły, wykrywa w moczu hormon hCG w niewielkiej ilości – stężenie 25mIU/ml. Wiarygodność badania wynosi ponad 99% i odpowiada to wiarygodności wyników testów przeprowadzanych w laboratorium.

Zastosowanie:

Test ciążowy hCG strumieniowy FHC-103H przeznaczony do stosowania w celu wykrywania wczesnej ciąży. Wskazania do wykonania testu: spóźniająca się miesiączka, współżycie bez zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Sposób użycia:

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Test można wykonywać o każdej porze dnia, przy czym zaleca się przeprowadzać badanie po przebudzeniu z pierwszej porannej próbki moczu. Test umieścić w strumieniu moczu lub włożyć do pojemnika z moczem – na 15 sekund. Wynik odczytać po 3 minutach. Interpretacja wyników: test nieważny – nie pojawia się linia w polu kontrolnym C lub nie pojawia się żadna linia; wynik negatywny – pojawia się tylko linia w polu kontrolnym C (jeśli test wyszedł negatywny, a miesiączka nadal się nie pojawiła, należy powtórzyć test); wynik pozytywny – pojawia się linia w polu kontrolnym C oraz linia w polu testowym T (jeśli test wyszedł pozytywny, należy zgłosić się do lekarza w celu potwierdzenia wyniku).