

# Test ciążowy Heltiso Duo 1 op.

Cena: 11,98 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 op.
Producent	MEDICINAE SP. Z O.O.
Rejestracja	

## Opis produktu

### Zawartość opakowania:

Opakowanie foliowe wewnątrz którego znajduje się test płytkowy oraz pochłaniacz wilgoci, instrukcja użycia.

### Charakterystyka produktu:

Wykrywa 2-3 dniową ciążę

Wiarygodność testu wynosi : 99,9%

Wysoka dokładność hCG już przy stężeniu 10 mIU/ml

### Sposób użycia:

- Skrócona instrukcja używania testu strumieniowego:

Wyjąć test z opakowania, zdjąć zatyczkę z końcówki absorbującej.

Skierować końcówkę absorbującą bezpośrednio pod strumień moczu na około 10 sekund, tak aby została dokładnie nasączona.

Nałożyć zatyczkę na końcówkę absorbującą i położyć na płaskiej powierzchni.

Wynik należy odczytać po upływie 3 minut od wykonania testu.

- Skrócona instrukcja używania testu płytkowego:

Pobrać próbkę moczu do pojemnika na mocz.

Wyjąć test z opakowania foliowego.

Położyć płytkę testową na płaskiej powierzchni.

Pobrać próbkę moczu z pojemnika na mocz za pomocą pipety. Trzymać pipetę pionowo, nanieść 4 krople pobranej próbki do okienka na próbkę moczu.

Wynik należy odczytać po upływie 3 minut do wykonania testu.