


Test ciążowy PINK-TEST płytkowy 1 szt.

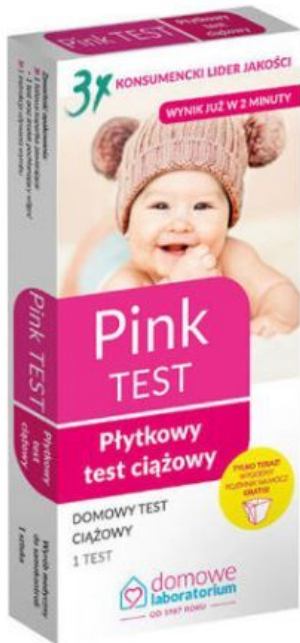

Cena: 7,99 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 szt.
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	

Opis produktu

Działanie Pink Test ciążowy płytkowy:

Test ciążowy płytkowy Pink to jeden z najchętniej wybieranych testów ciążowych dostępnych na rynku. Jest prosty w użyciu, dokładny (ponad 99,9%) i szybki (wynik po 2-5 minutach). Test wykrywa stężenie hormonu hCG (gonadotropina kosmówkowa) w moczu, jego czułość diagnostyczną określa się na poziomie 25ml/U. Co ważne, wynik jest łatwy do interpretacji. W zestawie znajduje się test oraz plastikowa pipetka.

Zastosowanie:

Pink Test ciążowy płytkowy przeznaczony do badania diagnostycznego u kobiet, które podejrzewają ciążę.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Produkt jednorazowego użytku.

Sposób użycia Testu ciążowego płytkowego Pink:

Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję. Zaleca się przeprowadzić test w pierwszym dniu po terminie przewidywanej miesiączki. Zaleca się wykonywać badanie rano, gdyż wówczas w moczu znajduje się najwięcej hormonu hCG. Przygotować próbkę moczu w czystym, suchym pojemniku plastikowych lub szklanym. Test położyć płasko na poziomej powierzchni. Pipetką nabrać niewielką ilość moczu. 3 pełne krople umieścić w okrągłym okienku na płytce testowej. W tym celu należy przez około jedną minutę trzymać pipetę pionowo nad okienkiem testowym. Otrzymane krople będą odpowiednio duże i bez pęcherzyków powietrza. Po upływie 2-5 minut można odczytać wynik. Wynik otrzymany po czasie dłuższym niż 10 minut uważa się za nieważny. Interpretacja wyników: wynik ujemny (brak ciąży) – pojawia się prążek w miejscu kontrolnym C, ale nie pojawia się w miejscu testowym T; wynik dodatni (ciąża) – na płytce testowej pojawiają się dwa prążki w miejscu kontrolnym C i testowym T (prążki nie muszą być tak samo intensywne). W przypadku, gdy nie pojawia się żaden pasek lub pasek jest widoczny wyłącznie w miejscu testowym T wynik jest prawdopodobnie nieważny.