

## Test ciążowy PINK-TEST strumieniowy 1 szt.



Cena: 7,99 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 szt.
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	

### Opis produktu

#### W zestawie:

Aluminiowa, szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się: test strumieniowy i środek pochłaniający wilgoć; instrukcja użycia.

#### Działanie Pink Super Czujący test ciążowy strumieniowy:

Produkt wykazuje czułość diagnostyczną na poziomie 10mIU/ml, czyli wykrywa już niewielką ilość ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu. Hormon ten wchodzi w reakcję z monoklonalnymi przeciwciałami anti-hCG znajdującymi się na teście. Do wykonania testu nie są potrzebne dodatkowe narzędzia, końcówkę testu należy jedynie skierować pod strumień moczu, a wynik już po 1-4 minutach ukazuje się w okienku.

#### Zastosowanie:

Pink Super Czujący test ciążowy strumieniowy rekomendowany do stosowania w warunkach domowych do wykrywania ciąży.

#### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Produkt jednorazowy.

#### Sposób użycia Super Czującego testu ciążowego strumieniowego Pink:

Końcówkę testu (po zdjęciu nasadki) należy wprowadzić pod strumień moczu, pozostawić na 10 sekund. Ewentualnie końcówkę testu można włożyć na 10 sekund do czystego pojemniczka ze świeżo zebraną próbką moczu. Następnie należy nałożyć nasadkę, położyć test na poziomej powierzchni. Po 1-4 minutach wynik będzie widoczny w okienku. Interpretacja wyniku: pojawia się jedynie pasek kontrolny C – wynik ujemny (brak ciąży); pojawiają się dwa paski w strefie kontrolnej oraz w strefie testowej – wynik dodatni (ciąża); wynik nieważny jest wtedy, gdy nie pojawia się żaden pasek lub pasek pojawi się jedynie w strefie testowej. Uwaga: wynik pokazujący się po okresie dłuższym niż 10 minut nie powinien być brany pod uwagę.