

Test ciąży z krwi BABYCHECK-1 WB



Cena: 28,61 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 szt.
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Test ciąży z krwi służy do badania obecności **hormonu hCG w krwi z nakłucia palca**. Test hCG z krwi można wykonać o każdej porze dnia.

Test zapewnia wykrycie nawet bardzo wczesnej ciąży, już kilka dni po zapłodnieniu.

Jest ultraczuły.

Dokładność testu wynosi ponad 98%.

Wynik pozytywny oznacza ciążę (norma hCG zgodna z rekomendacjami WHO).

Wskazania do stosowania:

Do wczesnego wykrywania ciąży.

Sposób użycia:

Dokładnie umyj ręce i osusz.

Wyciągnij z opakowania wszystkie elementy testu.

Następnie rozewnij aluminiową saszetkę i wyjmij płytkę testową oraz pipetę do pobrania krwi.

Przygotuj nakłuwacz nie dotykając przycisku uwalniającego.

Przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od nakłuwacza - nie ciągnij!

Następnie kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty), zdejmij i wyrzuć szarą nakrętkę.

Dociśnij mocno nakłuwacz do palca i naciśnij przycisk zwalniający lancet.

Pobierz krew do pipety (nie ściskaj wybrzuszenia pipety!), przyłóż koniec pipety do kropli krwi, która swobodnie będzie migrować do linii wyznaczonej na pipecie.

Przenieś pobraną krew nanieś do dołka próbkowego na płytce testowej i dodaj diluent.

Po upływie 5 min odczytaj wynik testu zgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcji.

Ważne uwagi oraz informacje dodatkowe:

Test jednorazowego użytku.

W przypadku wczesnej ciąży - test ciąży z krwi pozwala uzyskać znacznie mniejszy odsetek wyników fałszywie negatywnych, niż w przypadku testów z moczu.

Zawartość opakowania:

1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca (1 test, 1 saszetka z pochłaniaczem wilgoci),

1 sterylny lancet (nakłuwacz) do pobierania próbek krwi,

1 butelka z zakraplaczem zawierająca 1ml diluentu (rozcieńczalnika),

1 ulotka z instrukcją użytkowania.

