

## Test HIV - INSTI HIV SELF TEST 1 sasz.

Cena: 104,98 zł



### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	1 sasz.
Postać	saszetka
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	

### Opis produktu

**W zestawie znajdziemy:**

Urządzenie testujące, buteleczki z buforem, zakraplacz, lancet, podkładka alkoholowa, ulotka.

**Działanie:**

Szybki test do samodzielnego wykonania – polega na jakościowym i wizualnym określeniu przeciwciał IgG i IgM, które powstają podczas reakcji immunologicznej organizmu po kontakcie z wirusem HIV. Wirus HIV to ludzki wirus niedoboru odporności, który wywołuje AIDS. Wyrób medyczny INSTI HIV Self test przesiewowy pomaga wykrywać przeciwciała wirusa HIV typu 1 i 2 w próbce krwi. Test jest bardzo czuły, pozwala wykryć przeciwciała już po 21/22 dniach od kontaktu, w którym mogło dojść do zakażenia. Do zakażenia może dochodzić przez kontakt seksualny, przez skażony sprzęt do wstrzykiwań, ponadto na drodze okołoporodowej i przez ekspozycję na wydzieliny i tkanki zawierające wirusa. Badania wskazują, że produkt pod warunkiem poprawnego wykonania jest bardzo dokładny i czuły (100%). Test jest prosty do wykonania, wynik pojawia się w ciągu jednej minuty. W opakowaniu znajduje się pełen zestaw do wykonania jednego testu.

**Zastosowanie:**

Wyrób medyczny INSTI HIV Self test przesiewowy przeznaczony do stosowania w celu wykrywania przeciwciał wirusa HIV typu 1 i 2 w próbce krwi.

**Informacje dodatkowe:**

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

**Sposób użycia:**

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użycia. Pobrać próbkę krwi z palca za pomocą lancetu. Krew wlać do butelki numer jeden, wstrząsnąć. Do otworu na kasetce wlać jeden po drugim wszystkie roztwory. Wynik odczytać po minucie. Interpretacja wyniku: wynik negatywny – pojawia się tylko kropka kontrolna, wynik pozytywny – pojawia się kropka kontrolna i kropka testowa, wynik nieważny – w ogóle nie pojawia się kropka kontrolna.