

Tick Twister Haczyk do usuwania kleszczy



Cena: 9,07 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	2 szt.
Producent	PORTICA S.C.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Działanie Tick Twister haczyk do usuwania kleszczy:

W opakowaniu znajdziemy kleszczołapki w dwóch rozmiarach: dużym oraz małym. Mały haczyk polecany jest do usuwania małych kleszczy, a także do usuwania ich z miejsc trudno dostępnych. Haczyk do wykręcania kleszczy Tick Twister usuwa je bezboleśnie, zabieg trwa zaledwie kilka sekund. Przyrząd nie ściska ciała pasożyta, więc eliminuje ryzyko jego przerwania, tym samym zmniejsza ryzyko późniejszych powikłań zdrowotnych.

Zastosowanie Tick Twister haczyk do usuwania kleszczy:

Tick Twister haczyk do usuwania kleszczy polecany do stosowania zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.

Informacje dodatkowe Tick Twister haczyk do usuwania kleszczy:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Przyrząd wielokrotnego użytku.

Sposób użycia Tick Twister haczyk do usuwania kleszczy:

Haczyk wprowadzamy między skórę a kleszcza, zaleca się to zrobić możliwie jak najbliżej skóry. Kleszcz musi znajdować się między ząbkami. Unieść delikatnie haczyk, 2-3 razy przekręcić uchwyt. Wyjętego kleszcza należy położyć na kartce papieru i dokładnie sprawdzić, czy został wyciągnięty w całości. Po zabiegu należy dokładnie zdezynfekować miejsce wkłucia, a następnie umyć ręce preparatem antybakteryjnym.