

## URGO Filmogel® Afty i drobne rany w jamie ustnej



Cena: 41,83 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	6 ml
Postać	Filmogel
Producent	LABORATORIUM VIVA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Afty

### Opis produktu

URGO Filmogel® Afty i drobne rany w jamie ustnej to innowacyjny opatrunek w płynie, który:• izoluje ranę od pokarmu i drobnoustrojów aż do 4H

- działa już po 10 sekundach
- działa skutecznie nawet w trakcie posiłku
- ułatwia i przyspiesza gojenie
- jest dobrze tolerowany przy długotrwałym stosowaniu, np. przy urazach spowodowanych aparatami ortodontycznymi
- jest wodoodporny
- ma przyjemny smak tutti frutti

90% SATYSFAKCJI KONSUMENTÓW- NATYCHMIASTOWA ULGA W BÓLU!Likwiduje ból w ciągu 10 sek. od aplikacji – 74%.\*

Po 3 dniach likwiduje stan zapalny – 100%.\*

\*Badanie kliniczne DERMSCAN Nr 05E0641PH,p.42/43

### Wskazania

URGO na Afty jest wskazany do leczenia aft i drobnych ran w jamie ustnej.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku owrzodzenia jamy ustnej o średnicy większej niż 1 cm lub opryszczkowego owrzodzenie jamy ustnej (duża liczba małych owrzodzeń), które wymagają konsultacji lekarskiej.
- Nie stosować na zainfekowane rany, oparzenia i głębokie rany krwawiące.
- Nie stosować w przypadku alergii na pochodne kwasu salicylowego.
- Z uwagi na brak danych, nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz u dzieci.
- Produkt może być stosowany od 18 roku życia.

### Sposób użycia

- Wyjmując szpatułkę z butelki wytrzymaj jedną stronę o brzeg butelki.
- Nanieś preparat na aftę lub ranę drugą stroną szpatułki do całkowitego pokrycia zmienionego miejsca.
- Pozostaw do wyschnięcia.
- Po 10 sekundach od aplikacji utworzy się widoczny film. Jeżeli czujesz, że film nie pokrywa odpowiednio aftey lub rany, nanieś preparat ponownie.
- Nakładać tak często jak to jest konieczne najlepiej przed posiłkami. **Maksymalnie do 4 razy na dobę do całkowitego wygojenia (około 3 do 5 dni).**
- Nie ma potrzeby nakładania nowej warstwy preparatu, jeżeli poprzednia jest jeszcze widoczna.
- Skład preparatu zapewnia higienę i nie ma konieczności czyszczenia szpatułki.

### Składniki

Pochodna celulozy, kwas nieorganiczny, kwas karboksylowy, alkohol, woda, aromat, sukraloza.

### Ważne

- Należy zawsze zamknąć preparat po użyciu.
- Preparat należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.
- Stosować wyłącznie na błonę śluzową jamy ustnej.
- Tuż po aplikacji może pojawić się chwilowe uczucie dyskomfortu i mrowienia.
- Nie usuwać filmu po jego utworzeniu, zniknie samoczynnie.
- Jeżeli po 5 dniach od stosowania nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.
- Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wypijać zawartości buteleczki.
- Palenia tytoniu w trakcie aplikacji, w czasie schnięcia preparatu lub w pobliżu otwartej butelki jest wzbronione.
- W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z farmaceutą.
- W przypadku, gdy rana wywołana jest noszeniem protezy preparat należy aplikować unikając kontaktu z protezą.

### Zawartość opakowania

URGO Filmogel® Aftey i drobne rany w jamie ustnej 6 ml

### Przechowywanie

Przechowywać z dala od ognia i iskiei, w temperaturze poniżej 30°C.  
Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

### Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 142B,  
02-305 Warszawa