

URGO na Pęcherze duży rozmiar 7,2 cm x 4,3 cm



Cena: 24,82 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	7,2 cm x 4,3 cm
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plaster hydrokoloidowy
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Na pęcherze

Opis produktu

URGO na Pęcherze to samoprzylepne opatrunki do stosowania miejscowego na duże pęcherze z pogrubioną masą hydrokoloidową.

- Absorbują wydzielinę powstającą w pęcherzu, tworząc żelową poduszczkę ochronną, która natychmiast łagodzi ból.
- Dopasowują się do kształtu stopy.
- Chronią pęcherz przed uciskiem i otarciami.
- Przyspieszają gojenie.

Wskazania

Do stosowania na pęcherze u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia (młodsze dzieci mogą stosować ten opatrunek pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych).

Przeciwwskazania

- Przeciwwskazany w przypadku zakażonych ran.
- Przeciwwskazany w przypadku zapalenia tętnic kończyn dolnych.
- Przeciwwskazany w przypadku zakażonej stopy cukrzycowej.

Sposób użycia

- Nie przekłuwać pęcherza.
- Niezależnie od tego, czy pęcherz został przekłuty, czy nie, należy oczyścić pęcherz i jego okolice wodą z mydłem i zdezynfekować, używając roztworu antyseptycznego (niezawierającego alkoholu).
- Osuszyć sterylnym kompresem lub pozostawić do wyschnięcia.
- Zdjąć przezroczystą folię ochronną (strefa oznaczona strzałką).
- Ogrzać opatrunek w dłoniach, aby ułatwić jego formowanie, i zdjąć ochronną część ozdobną.
- Nałożyć opatrunek tak, aby pogrubiona część środkowa znalazła się na pęcherzu.
- Dokładnie wygładzić i przycisnąć opatrunek, aby poprawić jego przyleganie.
- Opatrunek nie powinien pozostawać na miejscu dłużej niż przez 2–3 dni; jeśli nie odpadnie sam, należy go usunąć.

- Należy zmieniać opatrunek zgodnie z instrukcją użycia.

Ważne

- Niesterylny opatrunek hydrokoloidowy wskazany do leczenia pęcherzy; jest wodoodporny przy codziennych kąpielach. - Nadaje się do samodzielnego stosowania przez dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat (młodsze dzieci mogą stosować ten opatrunek pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych).
- Nie przycinać.
- Produkt do jednorazowego użytku; nie zmieniać położenia już nałożonego opatrunku, nie używać ponownie tego samego opatrunku (ryzyko zakażenia).
- Opatrunki hydrokoloidowe w połączeniu z wysiękiem tworzą biały żel. W razie pozostania kleistych pozostałości hydrokoloidu na skórze zalecane jest namoczenie w wodzie. Warstwa klejąca zwiększy swoją objętość, straci przyczepność i odłączy się od skóry. - Nie stosować opatrunku ani nie usuwać już zastosowanego opatrunku i skonsultować się z lekarzem:

-jeżeli stan pęcherza pogarsza się lub jeśli nie ma poprawy po 6 dniach leczenia,
-w przypadku obecności objawów zakażenia (zaczerwienienie, ból, uczucie gorąca, obrzęk wokół rany, ropa, itp.),
-w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dyskomfortu.

- Pacjenci z cukrzycą powinni stosować opatrunki hydrokoloidowe wyłącznie pod kontrolą lekarza lub pielęgniarki.
- Nie używać opatrunków dłużej niż przez kolejne 30 dni.
- Opatrunki należy przechowywać w oryginalnym pudełku.
- Nie używać po upływie terminu ważności (podanego na pudełku).
- Nie używać ponownie wcześniej użytego plastra (ryzyko infekcji).

Zawartość opakowania

5 sztuk, rozmiar 7,2 cm x 4,3 cm

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa