

URGO Oparzenia i rany powierzchniowe 10 cm x 7 cm



Cena: 29,87 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	10 cm x 7 cm
Opakowanie	4 sztuki
Postać	Plaster samoprzylepny
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Na oparzenia, Na rany

Opis produktu

URGO Oparzenia to sterylne opatrunki gotowe do użycia w przypadku oparzeń powierzchniowych pierwszego i drugiego stopnia, a także ran powierzchniowych.

Opatrunki URGO Oparzenia i rany powierzchniowe:

- Opatentowana siateczka lipidowo-koloidowa szybko łagodzi ból, przyspiesza gojenie i umożliwia bezbolesne usunięcie opatrunku, ponieważ nie przykleja się do rany.
- Przy zetknięciu gazy z wysiękiem z rany tworzy się lipidowo-koloidowy żel, dzięki temu powstają odpowiednie warunki do gojenia rany w wilgotnym środowisku.
- Składa się z cienkiej, poliestrowej siateczki nasączonej cząstkami hydrokoloidu oraz wazeliny, która dzięki swoim ochronnym właściwościom minimalizuje ryzyko uszkodzenia rany podczas zmiany opatrunku.

Wskazania

Oparzenia I i II stopnia powstałe przy pracach domowych oraz rany powierzchniowe.

Przeciwwskazania

Nie stosować na głębokie oparzenia drugiego stopnia, oparzenia trzeciego stopnia oraz na oparzenia twarzy. W powyższych przypadkach konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Stosowanie

- Pierwszy opatrunek należy zmienić po 24 godzinach, a kolejne co 48 do momentu wygojenia.
- Zmienić opatrunek jeśli po umyciu pod prysznicem wydaje się wilgotny, jeśli opatrunek jest nasiąknięty krwią lub wysiękiem.

Sposób użycia

W przypadku oparzenia powierzchniowego drugiego stopnia:

- Na początek schłodzić ranę zimną wodą przez 15 minut, aby zapobiec rozszerzeniu oparzenia.

We wszystkich przypadkach:

- Oczyszczyć ranę roztworem antyseptycznym nie zawierającym alkoholu. Przemycić wodą lub solą fizjologiczną. W przypadku oparzenia nigdy nie stosować barwnych roztworów antyseptycznych takich jak eozyna.
- Starannie osuszyć przy użyciu sterylnego kompresu. W miarę możliwości zadbać o to, by powstały pęcherz nie pękł, ponieważ chroni on ranę przed zakażeniem. W przypadku pęknięcia pęcherza, zdezynfekować ranę. Nie należy usuwać warstwy martwego naskórka jeżeli nie zejdzie samoczynnie.
- Oderwać folię ochronną. Nałożyć na ranę. Stosowanie kremu przed nałożeniem opatrunku jest zbędne. Proces leczenia trwa zazwyczaj od 5 do 6 dni, przy czym **pierwszy opatrunek należy zmienić po 24 godzinach, a kolejne co 48 godzin.**

Ważne

- Opatrunki przeznaczone do miejscowego leczenia ran, których rozmiar nie przekracza wielkości kompresu.
- W rozległych oparzeniach, zalecane jest aby kompres wystawał poza ranę w celu pochłaniania wysięku.
- Jeśli po 6 dniach stosowania nie ma poprawy należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku oparzeń u dzieci skonsultuj się z farmaceutą. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia (zaczerwienienie, pojawiające się na zdrowej skórze, ból...) skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Opatrunek URGO Oparzenia musi być zużyty od razu po otwarciu.
- Do jednorazowego użytku.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Zawartość opakowania

4 opatrunki o rozmiarach 10 cm x 7 cm.

Przechowywanie

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci.

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa