

URGO Oparzenia i rany powierzchniowe wodoodporny 10 cm x 7 cm



Cena: 39,55 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	, -
Opakowanie	4 sztuki
Postać	Plaster
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	, -
Zastosowanie	Na oparzenia, Na rany

Opis produktu

URGO Oparzenia wodoodporny to sterylne opatrunki gotowe do użycia w przypadku oparzeń powierzchniowych pierwszego i drugiego stopnia, a także ran powierzchniowych.

Opatrunki URGO Oparzenia i rany powierzchniowe:

- Półprzepuszczalne, oddychające podłoże jest przepuszczalne dla pary wodnej, ale nieprzepuszczalne dla wody
- Opatentowana siateczka lipidowo-koloidowa szybko łagodzi ból, przyspiesza gojenie i umożliwia bezbolesne usunięcie opatrunku, ponieważ nie przykleja się do rany.
- Przy zetknięciu gazy z wysiękiem z rany tworzy się lipidowo-koloidowy żel, dzięki temu powstają odpowiednie warunki do gojenia rany w wilgotnym środowisku.
- Składa się z cienkiej, poliestrowej siateczki nasączonej cząstkami hydrokoloidu oraz wazeliny, która dzięki swoim ochronnym właściwościom minimalizuje ryzyko uszkodzenia rany podczas zmiany opatrunku
- Opatrunek wodoodporny, może być stosowany podczas kąpieli pod prysznicem.

Wskazania

Oparzenia I i II stopnia powstałe przy pracach domowych, a rany powierzchniowe.

Przeciwwskazania

- Nie stosować na głębokie oparzenia drugiego stopnia, oparzenia trzeciego stopnia oraz na oparzenia twarzy. W powyższych przypadkach konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
- Nie stosować na błony śluzowe.
- Nie stosować jako przykrycie lub do naprawy innych opatrunków.
- Przeciwwskazane w przypadku zapalenia tętnic kończyn dolnych, zakażonej stopy cukrzycowej.
- Nie używać dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Stosowanie

- Pierwszy opatrunek należy zmienić po 24 godzinach, a kolejne co 48 do momentu wygojenia.
- Zmienić opatrunek jeśli po umyciu pod prysznicem wydaje się wilgotny, jeśli opatrunek jest nasiąknięty krwią lub wysiękiem.

Sposób użycia

- W przypadku oparzenia powierzchniowego drugiego stopnia: Na początek schłodzić ranę zimną wodą (ale nie lodowatą) przez 15 minut, aby zapobiec rozszerzeniu oparzenia.

We wszystkich przypadkach:

- Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.
- Przeemyć ranę wodą lub solą fizjologiczną.
- Odkazić ranę i jej okolicę roztworem antyseptycznym nie zawierającym alkoholu. W przypadku oparzenia nie stosować barwnych roztworów antyseptycznych takich jak eozyna.
- Starannie osuszyć ranę i jej okolicę przy użyciu sterylnego kompresu.
- Powstrzymać krwawienie stosując ucisk.
- Otworzyć saszetkę i wyjąć opatrunek (zżyć zaraz po otwarciu).
- Przy nakładaniu opatrunku należy uważać, żeby nie dotykać palcami samoprzylepnej części oraz zadbać o to, aby wkład (biała część) znalazł się na ranie.
- Zdjąć pierwsze skrzydełko ochronne. Nałożyć opatrunek wygładzając go w kierunku krawędzi, unikając zagięć, a także naprężania skóry lub opatrunku.
- Zdjąć drugie skrzydełko i postąpić w ten sam sposób.
- W miarę możliwości zadbać o to, by powstały pęcherz nie pękł, ponieważ chroni on ranę przed zakażeniem.

Ważne

- Opatrunki przeznaczone do miejscowego leczenia ran, których rozmiar nie przekracza wielkości kompresu. W przypadku oparzeń wkład musi być znacznie większy niż oparzenie, aby umożliwić wchłanianie wysięku (rozmiar wkładu, czyli białej części musi być co najmniej dwukrotnie większy od rozmiaru oparzenia).
- W przypadku ciał obcych w ranie, dużego krwawienia, ugryzienia, ostrego i/lub zabrudzonego przedmiotu lub w przypadku braku postępów gojenia po 6 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- W przypadku wszelkich oparzeń i dzieci należy skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem.
- W przypadku wystąpienia objawów klinicznych miejscowego zakażenia (ciepło, zaczerwienienie rozciągające się na nieuszkodzoną skórę, ból, ropna wydzielina, obrzęk itd.) należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed nałożeniem opatrunku na twarz, ze względów estetycznych.
- Osoby z cukrzycą powinny używać opatrunków hydrokoloidowych wyłącznie pod nadzorem lekarza lub farmaceuty.
- Ponowne użycie opatrunku jednorazowego użytku może stwarzać ryzyko zakażenia.
- Sprawdzić integralność pojedynczego opakowania, aby zapewnić sterylność przed użyciem.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Przyleganie opatrunku może być pogorszone przez obecność włosów, tłustych produktów (kremów itp.) lub w obrębie stawów o dużej ruchomości.
- Nie używać do kąpieli.

Zawartość opakowania

4 opatrunki duże o rozmiarach 10 x 7 cm.

Przechowywanie

Chronić przed światłem.

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa

