

# URGO Siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe 8 cm x 8 cm



Cena: 43,04 zł

## Opis słownikowy

|              |   |
|--------------|---|
| Czas dostawy | 1-3 dni robocze   |
| Dawka        | 8 cm x 8 cm   |
| Opakowanie   | 4 sztuki  |
| Postać       | Siateczka nasączona cząstkami hydrokoloidu oraz wazeliny. |
| Producent    | LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.                         |
| Rejestracja  | Wyrób medyczny inny                                       |
| Zastosowanie | Na oparzenia, Na rany                                     |

## Opis produktu

URGO Siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe to gotowa do użycia, sterylna siateczka z opatentowaną technologią lipidokoloidową (TLC). Skuteczność TLC została potwierdzona w badaniach klinicznych. Opatrunek składa się z cienkiej poliestrowej siateczki nasączonej cząstkami hydrokoloidu oraz wazeliny.

URGO Siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe:

- Leczy oparzenia I i II stopnia oraz rany powierzchniowe.
- Szybko uśmierza ból.
- Przyspiesza gojenie – hydrokoloid w kontakcie z wysiękiem z rany tworzy lipidowo-koloidowy żel. Dzięki temu powstają odpowiednie warunki do gojenia rany w wilgotnym środowisku.
- Umożliwia bezbolesne usunięcie opatrunku – cząsteczki wazeliny zapobiegają przywieraniu opatrunku do rany.
- Dopasowana do wielkości rany - możliwość docięcia siateczki lub ułożenia siateczek jedna obok drugiej, aby pokryć rozległe rany o nieregularnym kształcie.

### Wskazania

Oparzenia I i II stopnia powstałe przy pracach domowych, i rany powierzchniowe.

### Przeciwwskazania

Nie stosować na głębokie oparzenia drugiego stopnia, oparzenia trzeciego stopnia oraz na oparzenia twarzy. W powyższych przypadkach konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

### Sposób użycia

W przypadku oparzenia powierzchniowego drugiego stopnia:

- Na początek schłodzić ranę zimną wodą przez 15 minut, aby zapobiec rozszerzeniu oparzenia.

#### We wszystkich przypadkach:

- Oczyszczyć ranę roztworem antyseptycznym nie zawierającym alkoholu.
- Przemycić wodą lub solą fizjologiczną. **W przypadku oparzenia nigdy nie stosować barwnych roztworów antyseptycznych takich jak eozyna.**
- Starannie osuszyć przy użyciu sterylnego kompresu. W miarę możliwości zadbać o to, by powstały pęcherz nie pękł, ponieważ chroni on ranę przed zakażeniem. W przypadku pęknięcia pęcherza, zdezynfekować ranę. Nie należy usuwać warstwy martwego naskórka jeżeli nie zejdzie samoczynnie.
- Oderwać folię ochronną. Nałożyć na ranę.
- Opatrunek w postaci siateczki w razie potrzeby można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru przy pomocy czystych, zdezynfekowanych nożyczek.
- Następnie przykryć drugim opatrunkiem takim jak rozciągliwa opaska lub plaster.
- Stosowanie kremu przed nałożeniem opatrunku jest zbędne.
- Czas stosowania opatrunku to zazwyczaj od 5 do 6 dni, przy czym **pierwszy opatrunek należy zmienić po 24 godzinach, a kolejne co 48 godzin.**

#### Ważne

- Opatrunki przeznaczone do miejscowego leczenia ran.
- W rozległych oparzeniach, zalecane jest aby kompres wystawał poza ranę w celu pochłaniania wysięku.
- Jeśli po 6 dniach stosowania nie ma poprawy należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku oparzeń u dzieci skonsultuj się z farmaceutą.
- W przypadku wystąpienia objawów zakażenia (zaczernienie, pojawiające się na zdrowej skórze, ból...) skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Urgo Siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe musi być zużyta od razu po otwarciu.
- Do jednorazowego użytku.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

#### Zawartość opakowania

4 siateczki o rozmiarach 8 cm x 8 cm.

#### Przechowywanie

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci.

#### **Dystrybutor**

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 142B,  
02-305 Warszawa