

# URGO SURGIFIX Elastyczna siateczka opatrunkowa

Cena: 17,52 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Siateczka opatrunkowa
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Na rany

## Opis produktu

URGO Surgifix Elastyczna siateczka opatrunkowa jest wykonana z delikatnego i trwałego materiału, który umożliwi podtrzymanie właściwego opatrunku w zastępstwie tradycyjnego bandaża lub plastra.

URGO Surgifix Elastyczna siateczka opatrunkowa:

- nie uciska rany i nie przykleja się do niej
- jest idealna dla delikatnej i wrażliwej skóry, nie wywołuje podrażnień
- nadaje się do prania i wielokrotnego użytku bez utraty elastyczności
- wygodna, przewiewna i rozciągliwa

Stosowanie siatki opatrunkowej pozwala skórze i ranie oddychać, zmniejszając tym samym ryzyko oparzeń. Siateczka daje możliwość obserwacji procesu gojenia.

### Wskazania

Podtrzymywanie opatrunku lub plastra. Zaleca się jej stosowanie przy bandażach zakładanych na trudno dostępne i niewygodne miejsca, pozwalając jednocześnie na zachowanie pełnej swobody ruchów.

### Sposób użycia

- Odmierz odpowiednią długość siateczki potrzebną do utrzymania opatrunku.
- Przytnij nożyczkami.
- Rozszerz siateczkę za pomocą dłoni.
- Załóż opatrunek, wsuwając jedną, a następnie drugą dłoń.
- Podwiń krawędzie na każdym końcu.
- Aby zmienić opatrunek wystarczy unieść siateczkę dłonią.

### Skład

Poliester 38%, Nylon 35%, Lateks 27%

### Ważne

- Nie stosować w przypadku uczulenia na lateks.
- Nie stosować bezpośrednio na ranę.
- Nie stosować produktu, jeżeli po nałożeniu występuje ucisk.
- Można prać w pralce w temperaturze 40°C.

**Zawartość opakowania**

1 sztuka, szerokość 5,5 cm

**Dystrybutor**

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 142B,  
02-305 Warszawa