

URGO TENS Nakładki żelowe do elektrostymulatora



Cena: 67,51 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	3 nakładki
Postać	Samoprzylepna nakładka żelowa
Producent	JKH Health Co., Ltd.,
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Akcesoria

Opis produktu

Produkt zawiera 3 wymienne nakładki do elektrostymulatora URGO TENS stosowanego w elektroterapii przeciwbólowej stawów i pleców co wystarcza wystarcza na 90 sesji.

Elektroterapia TENS zmniejsza lub całkowicie usuwa ból mięśni i stawów. Wytwarzany przez elektrostymulator prąd elektryczny jest przesyłany przez elektrody (obwód elektryczny z elementem żelowym) umieszczone na powierzchni skóry, co powoduje elektryczne pobudzenie nerwów i przynosi natychmiastową oraz długotrwałą ulgę w bólu.

Wskazania

Wymienne samoprzylepne nakładki żelowe do URGO TENS Elektrostymulator do ładowania.

Sposób użycia

- W trakcie nakładania elementów żelowych urządzenie musi być wyłączone.
- Należy wyjąć nakładkę żelową z saszetki. Saszetki nie wolno otwierać przy pomocy nożyczek,
- Delikatnie zdjąć z nakładki niebieską folię ochronną w taki sposób, aby obie części nakładki żelowej pozostały na przezroczystej folii ochronnej.
- Następnie umieścić oba elementy żelowej nakładki na elektrostymulatorze tak, aby idealnie przylegały do dwóch części obwodu elektrycznego.
- Zdjąć przezroczystą folię ochronną. Upewnić się, że nakładki pozostały na urządzeniu.
- Przezroczystą folię można wyrzucić.
- Należy zachować niebieską folię ochronną i zakładać ją na elektrostymulator po każdym użyciu.

Ważne

Nakładka żelowa na urządzeniu wystarcza na przeprowadzenie około 30 sesji. Po tym czasie może wymagać wymiany. Powinna być także wymieniona w przypadku widocznych uszkodzeń, ubytków lub też przy wyschniętej żelowej nakładce. Można próbować przedłużyć żywotność nakładki poprzez zwilżenie jej wodą (nie wolno zamoczyć całego urządzenia).

Zawartość opakowania

3 wymienne żelowe nakładki do URGO TENS Elektrostymulator do ładowania.

Producent

JKH Health Co., Ltd., 4-5F, Building 12, Hengmingzhu Industrial Park, Xinqiao Tongfuyu Industrial Area, Shajing, Baoan, Shenzhen, Chiny
Autoryzowany przedstawiciel w UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Ei_estrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa