

URGO Urgosterile Opatrunki samoprzylepne 10cm x 15cm



Cena: 24,84 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	10 sztuk
Postać	opatrunek włókninowy
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Na rany

Opis produktu

Urgostérile to delikatny włókninowy opatrunek z warstwą chłonną, wykazujący wysoką tolerancję skórą.

Opatrunek Urgostérile jest :

- sterylny, samoprzylepny,
- rozciągliwy i wygodny, nie krępuje ruchów
- chroni ranę i doskonale trzyma się na skórze dzięki warstwie samoprzylepnej z czterech stron opatrunku
- przepuszczający powietrze, umożliwia oddychanie ran i zmniejsza ryzyko maceracji naskórka
- łagodny dla skóry
- pokryty nieprzylegającą, ochronną gazą oraz kompresem wchłaniającym wysięki bez przywierania do rany.

Wskazania

Ochrona ran chirurgicznych, sztych oraz pourazowych.

Stosowanie

Opatrunek należy zmieniać co 24 do 48 godzin w zależności od stanu rany lub opatrunku.

Sposób użycia

- Oczyszczyć i zdezynfekować ranę.
- Następnie przepłukać roztworem soli fizjologicznej, wysuszyć brzegi rany przy użyciu sterylnego kompresu.
- Otworzyć saszetkę i wyjąć opatrunek, trzymając za dwie ochronne zakładki.
- Nałożyć opatrunek stopniowo pociągając za dwie ochronne zakładki.
- Dokładnie wygładzić brzegi opatrunku.

Skład

Białe, samoprzylepne podłoże z włókniny oraz kompres z włókniny pokryty nieprzylegającą, ochronną gazą.

Ważne

- Sterylny opatrunek do jednorazowego użytku. Nie należy używać ponownie ani zmieniać ułożenia już zastosowanego opatrunku (w przeciwnym razie występuje ryzyko zakażenia).
- Nie sterylizować ponownie.
- Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie bezpośrednio nie zostało naruszone. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Należy regularnie sprawdzać ranę i jej okolice, w celu wykrycia jakichkolwiek objawów zakażenia, takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk, nieprzyjemny zapach lub tworzenie się ropy.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zakażenia, należy skonsultować się z lekarzem lub z fachowym personelem medycznym.

Zawartość opakowania

10 opatrunków 100 mm x 150 mm

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie światła. Opatrunki należy przechowywać w oryginalnym pudełku.

Nie używać po upływie terminu ważności (wskazanego na pudełku i saszetce).

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa