

URGO Urgostrips Paski samoprzylepne do zamykania ran



Cena: 14,44 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	10 pasków
Postać	Samoprzylepne paski do zamykania ran
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	Na rany

Opis produktu

Urgostrips to sterylne, samoprzylepne paski do szybkiego zamykania powierzchownych ran i nacięć chirurgicznych bez konieczności szycia.

Paski Urgostrips do zamykania ran: • Przyspieszają i ułatwiają gojenie rany

- Redukują powstawanie blizn
- Hipoalergiczne – nie podrażniają skóry
- Oddychające – nie przepuszczają wilgoci, zapewniając odpowiednią regenerację skóry.

Wskazania

Szybkie zamknięcie powierzchniowych ran i nacięć chirurgicznych.

W szczególności:

- do zamknięcia ran w przypadku drobnych zabiegów o charakterze nagłym, chirurgii dermatologicznej, chirurgii plastycznej i ograniczonych nacięć pooperacyjnych (< 2.5 cm)
- początkowe zamknięcie do powierzchniowych ran lub ran bez naprężeń rozciągających
- do stosowania jako pomocnicze wzmocnienie między szwami lub zszywkami lub jako zamiennik w trzecim dniu gojenia się rany, aby ograniczyć ryzyko powstawania blizn
- jako szwy zewnętrzne pod gipsem lub żywicami.

Stosowanie

Nie zdejmować ani nie zmieniać pasków przy każdej zmianie opatrunku. Pozostawić na miejscu do zagojenia (3 do 4 dni jeżeli rana nie będzie ropieć i jeżeli paski nie odkleją się) i wymienić wyłącznie jeżeli będą odstawać i nie będą spełniać swojej funkcji.

Sposób użycia

- Oczyszczyć i zdezynfekować ranę i jej okolice roztworem antyseptycznym. W razie potrzeby monitorować hemostazę (zatrzymać krwawienie). Osuszyć sterylnym kompresem, aby zwiększyć przyczepność pasków.
- Otworzyć saszetkę aseptycznie. Jeśli konieczne jest przycięcie pasków, nożyczki powinny być sterylne lub zdezynfekowane alkoholem.
- Po dokładnym umyciu rąk wodą z mydłem, nakleić paski wzdłuż i po obu stronach rany, (patrz ilustracja).
- Unikać dotykania palcami części paska, która będzie miała kontakt z raną. Nakleić trzeci pasek prostopadle do jednej strony rany

i delikatnie pociągnąć, aby zapewnić doskonałe zblizenie brzegów rany, bez przerw ani zakładek.

- Nakleić następne paski w ten sam sposób do całkowitego zamknięcia rany. Wzmocnić przez ukośne naklejenie 2 pasków.

Pozostawić paski na miejscu (od 3 do 4 dni), aż do momentu odklejenia lub utraty ich funkcji. Należy zmieniać paski zgodnie z instrukcją, aż do całkowitego wygojenia się rany. Rana musi pozostać sucha. Podstawowe zagojenie rany powierzchownej trwa około dziesięć dni.

Ważne

- Obecność włosów lub tłustych produktów na skórze może wpływać na przyleganie pasków.
- Paski sterylne do jednorazowego użytku. Nie należy używać ponownie ani zmieniać ułożenia już zastosowanego paska, nie trzymać w otwartej saszetce (w przeciwnym razie występuje ryzyko zakażenia).
- Nie sterylizować ponownie. Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie bezpośrednio nie zostało naruszone. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Aby ograniczyć ryzyko wtórnego zakażenia rany, zaleca się, aby pokryć całość opatrunkiem antyseptycznym. Nie usuwać i nie zmieniać pasków przy każdej zmianie opatrunku.
- Gojenie się ran jest ułatwione, jeśli przy zakładaniu paska nie pozostawiono przerw lub zakładek między krawędziami rany.
- Należy regularnie sprawdzać ranę i jej okolice, w celu wykrycia jakichkolwiek objawów zakażenia, takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk, nieprzyjemny zapach lub tworzenie się ropy. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zakażenia, należy skontaktować się z lekarzem lub z fachowym personelem medycznym.
- Saszetki należy przechowywać w oryginalnym pudełku.
- Nie używać po upływie terminu ważności (wskazanego na pudełku i saszetce).

Zawartość opakowania

10 pasków 100 mm x 6 mm

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie światła.

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa