

Vizik krople na podrażnione i zaczerwienione oczy



Cena: 33,22 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Składniki:

Dekspantenol, karbomer, bezwodny kwas cytrynowy, sorbitol, woda wysokoczyszczona.

Działanie:

Krople do oczu, które bez obaw mogą stosować osoby noszące soczewki kontaktowe. Łagodzące krople na podrażnione oczy Vizik zawierają prowitaminę B5, czyli dekspantenol oraz karbomer. Dekspantenol wykazuje zdolność wiązania wody, nawilża oraz pielęgnuje oko, wspomaga dodatkowo procesy regeneracyjne rogówki. Drugą substancją aktywną zawartą w preparacie jest karbomer, który osłania nabłonek rogówki, tworzy specjalną barierę ochronną, która zapobiega podrażnieniu spojówki. Działa łagodząco na podrażnienia, które powstały wskutek niedostatecznego wydzielania łez. Krople tuż po aplikacji przynoszą ulgę zmęczonym i podrażnionym oczom. Formuła jest dobrze tolerowana także przy dłuższym okresie stosowania.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Vizik krople na podrażnione oczy przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia podrażnienia i zaczerwienienia oczu. Preparat nadaje się dla osób noszących szkła kontaktowe.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci, mrozu oraz światła. Należy zużyć w ciągu roku od pierwszego otwarcia. W przypadku stosowania innych preparatów do oka należy odczekać około 15 minut. Krople Vizik należy aplikować jako ostatnie. Preparat nie zawiera konserwantów, produkt sterylizowany.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kropli. Nie stosować w przypadku uszkodzenia lub infekcji rogówki.

Sposób użycia:

Przed aplikacją kropli zaleca się delikatnie odchylić głowę do tyłu, następnie odchylić dolną powiekę i wkropić jedną kroplę do worka spojówkowego, powiekę powoli zamknąć, aby preparat mógł zostać równomiernie rozprowadzony na powierzchni oka. Należy stosować 3-5 razy dziennie. Nie dotykać końcówką kroplomierza oka, rąk oraz innych powierzchni.