

Zatyczki do uszu Sanohra Swim dla dorosłych

Cena: 33,90 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 para
Postać	Zatyczki do uszu
Producent	Innosan GmbH D-68723 Schwetzingen
Zastosowanie	Aksesoria

Opis produktu

Sanohra Swim zatyczki do uszu dla dorosłych jest to produkt, który przyda się w szczególności tym osobom, które chcą chronić swoje uszy przed dostaniem się do nich wody.

Podczas pływania, kąpieli czy nurkowania woda może przeniknąć głęboko do przewodu słuchowego ograniczając słyszenie lub powodując uszkodzenie naturalnej ochrony uszu co w konsekwencji może spowodować rozwój drobnoustrojów i bakterii. Uczucie nieprzyjemnego ciśnienia, swędzenie czy ból mogą stanowić pierwsze symptomy zapalenia ucha.

Zatyczki Sanohra Swim są niezastąpione na basenie, ale także podczas kąpieli lub prysznica, jeśli tylko zachodzi potrzeba ograniczenia dostępu wody do przewodu słuchowego i możliwość wystąpienia "zatkania ucha".

Sanohra Swim zatyczki do uszu zostały wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, które doskonale dopasowuje się do indywidualnego kształtu ucha. Tłumią także nadmierny hałas, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Właściwości

- Zatyczki są dostępne w rozmiarze dla dorosłych.
- Wodoodporne stopery do uszu.
- Zapobiegają dostaniu się wody do uszu podczas pływania, nurkowania, kąpieli.
- Chronią przed infekcjami ucha środkowego.
- Bezpieczne, dopasowane do ucha.
- Produkt do wielokrotnego użytku.

Wskazania

Do ochrony przewodu słuchowego osób dorosłych przed wodą i hałasem. Zatyczki Sanohra Swim, dzięki ochronie przed wnikaniem wody do przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej, zapobiegają powstawaniu wilgoci w przewodzie słuchowym oraz pęcznieniu woskowiny, a przez to ograniczając rozwój bakterii, zarazków i grzybów.

Skład

Sanohra Swim zatyczki do uszu są wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, które doskonale dopasowuje się do indywidualnego kształtu ucha.

Sposób użycia

Szczegóły sposobu użycia znajdującej się w instrukcji dostępnej wewnątrz opakowania.

- Należy przełożyć jedno ramię przez głowę i następnie podnieść lekko górną część małżowiny ucha znajdującego się po drugiej stronie głowy.
- Spowoduje to poszerzenie przewodu usznego co ułatwi aplikację zatyczki .
- Następnie należy uchwycić zatyczkę za trzon między kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki i z lekkim ruchem obrotowym włożyć do przewodu usznego żeberkami do przodu.
- W analogiczny sposób należy postępować z drugim uchem.
- Wyjmując zatyczki należy postępować powoli wykonując lekki ruch obrotowy.
- Po oczyszczeniu i umyciu zatyczki mogą być zastosowane ponownie.

Ważne

- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do opakowania.
- Użycie ochrony uszu należy omówić wcześniej lekarzem.
- W razie stanów zapalnych ucha, uszkodzenia błony bębenkowej lub stosowania drenu należy skonsultować się z lekarzem. W
- Zatyczki nie służą do zabawy i dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zatyczki wymienić na nowe.
- Certyfikat zgodności z Europejską Normą Bezpieczeństwa EN 352-2:2002.

Zawartość opakowania

Zatyczki (stopery) do uszu na basen dla dorosłych Sanohra Swim 2 sztuki (1 para)

Przechowywanie

Zatyczki należy przechowywać w w oryginalnym, suchym pojemniku z dala od wysokich temperatur (maksymalnie 55°C).

Producent:

Innosan GmbH Beethovenstraße 3
68723 Schwetzingen
Niemcy

Dystrybucja w Polsce :

Kolpharma Sp. z o.o.
ul. Szobiszowicka 1
44 – 100 Gliwice

Galeria

